

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-001	Model AR-002	Model AR-003	Model AR-008	Model AR-009	Model AR-023
Regulacja wysokości:	79- 96 cm	79- 96 cm	70- 83 cm	70- 83 cm	78- 85 cm	79- 89 cm
Szerokość ramy balkonika po rozłożeniu:	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm	50 cm	57 cm
Szerokość (grubość) balkonika po złożeniu:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	20 cm	10 cm
Waga:	2,3 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	1,9 kg	2,4 kg
Maksymalna waga użytkownika	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	110 kg	120 kg

SYMBOLE:

								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu		
Nr LOT	Okres gwarancji	
Nazwa i nr katalogowy produktu	Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*
	Numer ewidencyjny zlecenia	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 - ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
 - W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
 - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się nasadek gumowych, kółek dot. model AR-003, AR-008, AR-009, uchwyty z tworzywa)
 - Gwarancją nie obejmuje w przypadku stosowania balkonika niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
 - Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
 - Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
 - Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

BALKONIKI ALUMINIOWE



Balkonik aluminiowy krocząco-stały
Model: AR-001



Balkonik aluminiowy krocząco-stały
Model: AR-002



Balkonik aluminiowy składany, dwukołowy
Model: AR-003



Balkonik aluminiowy – składany 3-funkcyjny
Model: AR-008



Balkonik aluminiowy z kulką składany, dwukołowy
Model: AR-009



Balkonik aluminiowy – krocząco-stały ułatwiający wstawanie
Model: AR-023



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - BALKONIKI ALUMINIOWE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszych produktów, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dodaaliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na balkoniku, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z balonika:

136 kg – (model: AR-001, AR-002, AR-003, AR-008), **110kg** - (model AR-009), **120kg** - (model AR-023)



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki aluminiowe są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie nogi balkonika ustawione są na tej samej wysokości
3. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone
4. Sprawdzenie czy kółka są solidnie przykręcone (dotyczy modelu AR-003, AR-008, AR-009)
5. Sprawdzenie czy wszystkie nity trwale łączą elementy balkonika
6. Nie rozkładanie balkonika w miejscach, gdzie może być ślisko (rozlana ciecz, lód)



W celu uniknięcia urazów:

1. Balkonik powinien być całkowicie rozłożony (zatrask blokujący w poprzeczce musi wskoczyć w otwór poprzeczki).
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności balkonika przed użyciem.
3. Wszystkie nogi balkonika muszą być ustawione na tej samej wysokości.
4. Używać balkonika tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie.
7. Balkoniki nie mogą być narażone na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych).
8. Nie wolno przeciążać balkonika, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
9. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób konserwacji:

Balkonik należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Balkonik należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy tj. (koła, rączki, nasadki gumowe na nogi) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie balkonika jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Balkonik nie jest stabilny.

- a. Czy wszystkie nogi balkonika są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je wcisnąć.
- d. Czy balkonik jest całkowicie rozłożony? Jeśli nie, należy zatrask blokujący na poprzeczce wcisnąć w otwór poprzeczki.
- e. Czy kółka balkonika są solidnie przykręcone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Dotyczy modelu AR-003, AR-008, AR-009
- f. Czy wszystkie nity łączące elementy balkonika są solidne? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ BALKONIKA!!!

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć balkonik z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny balkonika zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Chwycić oburącz za uchwyty z tworzywa (1) i przesunąć poręczę na zewnątrz aż do całkowitego rozłożenia balkonika. Zatrask blokujący na poprzeczce (4) musi wskoczyć w otwór poprzeczki (w przypadku składania balkonika należy ręką wcisnąć blokadę (4) znajdującą się na środku poprzeczki a następnie przesunąć jedną z poręczy do środka. Pozwoli to na odblokowanie zatrasku i złożenie drugiej poręczy składając tym samym balkonik. Rozkładanie modelu AR-009 - należy chwycić jedną ręką ramę z kółkami, drugą ręką ramę ze stopkami i rozsunąć do maksymalnego oporu. Następnie ramę poprzeczną zsunąć do „ograniczników”. Składanie modelu AR-009 – pociągnąć za kulkę do góry, do całkowitego złożenia.
4. Należy dopasować wysokość balkonika do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wcisnąć główkę zatrasku (5) znajdującego się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie wymaganą wysokość. Główna zatrasku musi wskoczyć w otwór na żądanej wysokości! Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg balkonika. Główna zatrasku we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości.
5. Balkonik w funkcji kroczącej (dotyczy modeli AR-001, AR-002, AR-008, AR-023). Należy wyciągnąć zatyczki blokujące (2) znajdujące się w otworze z pozycji (3) a następnie włożyć je w otwory ramy na pozycję (2). Położyć ręce na uchwytach (1) równocześnie. Unieść lekko prawa lub lewą część balkonika i przesunąć w żądanym kierunku, dostawić nogę. Tę czynność wykonywać na przemian wykonując ruch „kroczący”.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Złóż balkonik wciskając zatrask blokujący (4) lub (pociągnąć do siebie za kulkę - model AR-009) a następnie przesunąć jedną z poręczy do środka, spowoduje to zwolnienie blokady a tym samym umożliwi złożenie balkonika.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw balkonik w miejscu gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU