

- Przygotowanie do użycia:**
- Wyjąć wózek z opakowania kartonowego lub foliowego.
 - W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wózka zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
 - Rozłożyć wózek - wózek należy ustawić tyłmi kółkami do siebie następnie rozchylić przednią część wózka w kierunku do zewnątrz (po uprzednim rozłożeniu składanego oparcia do dot. AR-300). Ustawić wózek przednimi kółkami do siebie, ramię siedziska należy docisnąć aż do całkowitego rozłożenia wózka. Na siedzisku należy położyć poduszkę do mocowania podnóżka na wieszakach podnóżka oraz obrócić je maksymalnie do wewnątrz aż do momentu zaobłowania blokad podnóżka i słyszalnego charakterystycznego kliknięcia. Upewnić się, że podnóżki zostały zaobłowane. Następnie należy rozłożyć platformy podnóżków. Pas stabilizujący łydki należy przypiąć za pomocą rzepów na ramach podnóżków, przewlekając je przez oczka podnóżków
 - W celu indywidualnego dopasowania wózka do pacjenta należy ustawić prawidłową wysokość podnóżków. W tym celu należy posadzić pacjenta na wózku, nogi powinny być ugięte po kącie ~90° (odkrociec śrubę do regulacji wysokości podnóżków, ustawić właściwą wysokość i zakręcić ponownie)
 - Ustawić żądaną wysokość rączek dla prowadzącego (dot. AR-350) poprzez wykręcenie śrub do regulacji wysokości rączek, uniesieniu ich i ponownym wykręceniu śrub zatraskowych (boczek zatraskowy musi wejść w otwór do regulacji wysokości - słyszalne „klik”) (boczek zatraskowy może być także ustawiony na 104 x 60,49 x 95-103 cm)
 - Ustawić żądaną wysokość kół przednich i tylnych - środek ciężkości (dot. AR-330A, AR-350) poprzez odłączenie śrub w przednich i tylnych kółkach. Podniesieniu kół na właściwą pozycję przyskręceniu śrub ponownie.
 - Ustawić żądaną wysokość podłokietników (dot. AR-350) poprzez wciśnięcie przycisku do regulacji wysokości podłokietników (trzymając - podnieść podłokietnik)
 - Ustawić żądaną wysokość kół przednich i tylnych - środek ciężkości (dot. AR-330A, AR-350) poprzez odłączenie śrub w przednich i tylnych kółkach. Podniesieniu kół na właściwą pozycję przyskręceniu śrub ponownie.
 - Ustawić żądaną wysokość rączek dla prowadzącego (dot. AR-350) poprzez wykręcenie śrub do regulacji wysokości rączek, uniesieniu ich i ponownym wykręceniu śrub zatraskowych (boczek zatraskowy musi wejść w otwór do regulacji wysokości - słyszalne „klik”) (boczek zatraskowy może być także ustawiony na 104 x 60,49 x 95-103 cm)
- Czyszczenie i przechowywanie:**
- Eventualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.**
- Postaw wózek w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, silne nasłonecznienie)
 - W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Dane Techniczne:

PARAMETR:	AR-300	AR-330A	AR-350
Rama / kolor:	Aluminiowa / Srebrny metalic	Aluminiowa / Srebrny metalic	Aluminiowa / Srebrny metalic
Typ / model:	Składany, rama kryształkowa	Składany, rama kryształkowa	Składany, rama kryształkowa
Wymiary całkowite	107 x 68 x 92 cm	104 x 66 x 95 cm	104 x 60,49 x 95-103 cm
Waga średnia produktu:	13 kg	16 kg	16,5 kg
Maksymalne obciążenie:	130 kg	135 kg	135 kg
Wypozyczenie standardowe	Składane oparcie. Anybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie. W zestawie dodatkowe miękkie siedzisko i oparcie z materiału siatkowego Mesh. Uchyłne, odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Pasy zabezpieczające stopy. Uchyłne, obracane podłokietniki. Pas biodrowy. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna z funkcją blokady stojowej. Stopki dla opiekuna kół tylnych - pompomwane lub pełne (szybkołączki). Kół tylnych - pompomwane lub pełne (szybkołączki). Kół przednich i tylnych (opcjonalnie) - Kół anty-wywrócenie z regulacją wysokości	Nylonowe oparcie i siedzisko (torbiel/ kieszeń na oparcie). Poduszka do siedzenia. Uchyłne odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Uchyłne i odpinane podłokietniki. Pas biodrowy. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna. Pasy zabezpieczające stopy. Uchyłne, podtrzymujące łydki. Kół przednie - bezosłupowe. Kół tylnych - pompomwane lub pełne (szybkołączki). Regulacja środka ciężkości (regulacja wysokości kół przednich i tylnych) (opcjonalnie) - Kół anty-wywrócenie z regulacją wysokości.	Nylonowe oparcie i siedzisko. Poduszka do siedzenia. Pas biodrowy. Uchyłne podłokietniki z regulacją wysokości. Uchyłne odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Regulacja wysokości rączek dla opiekuna. Kół anty-wywrócenie z tyłu. Regulacja wysokości. Mini kół dojazdowe z tyłu. Hamulec dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna. Pasy zabezpieczające stopy. Uchyłne, podtrzymujące łydki. Kół przednie - bezosłupowe. Kół tylnych - pompomwane lub pełne (szybkołączki). Regulacja środka ciężkości (regulacja wysokości kół przednich i tylnych) (opcjonalnie) - Kół anty-wywrócenie z regulacją wysokości (regulacja wysokości kół przednich i tylnych)

SYMBOLE:

						
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr daty / serii	Data produkcji m-c-rok	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży		Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu			
Nr LOT			
Nazwa i nr katalogowy produktu		Okres gwarancji	
Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?		*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*	
		Numer ewidencyjny zlecenia	
			

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwycięzowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się do dokonania niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy od wad, w przypadku, gdy uszko, za który naprawa czynna ją nieopłacalna.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy niezwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchyłków i tworzywa)
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wózka niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez Użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w naszym stanie higienicznym.**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA**

WÓZKI INWALIDZKIE ALUMINIOWE



AR-300 Wózek inwalidzki
aluminiowy
ERGONOMIC



AR-330A Wózek inwalidzki
aluminiowy
DYNAMIC



AR-350 Wózek inwalidzki
aluminiowy
PRESTIGE



INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZKI INWALIDZKIE ALUMINIOWE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego wózka inwalidzkiego, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Doleżyłoby wszystkim starsi aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że będzie praktyczny, pomożemy i zniechęcimy ulawni Państwa poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobów:

Wózek inwalidzi jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym, przeznaczonym do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, porażeniu mózgowym oraz z różnymi uszkodzeniami, niedowładami kończyn dolnych. Jak również dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-ruchowych, a także dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym pomimo problemu z narządami ruchu.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozostawienia wózka: Zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wózków bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkownika:
Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z wózka: model AR-300 – 130 kg model AR-330A – 135 kg model AR-350 – 135 kg

Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Bezpieczeństwo, dokładne sprawdzenie czy wszystkie elementy składowe nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały właściwie połączone, wózek (wybrany model) musi wyglądać zgodnie ze zdjęciem niniejszej instrukcji
3. Sprawdzenie kaskadowo po montażu kół tylnych czy zadziałała blokada osi tylnej koła (szybkołączki), przy montażu powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie zatrzasku, dodatkowo należy sprawdzić poprzez silne szarpnięcie każdego koła bez wskazania przycisku „szybkołączki” czy jest stabilnie zamocowane
4. Sprawdzenie czy wózek jest całkowicie rozłożony
5. Nie rozkładanie ani użytkowanie wózka na podłożu nie dającym pewnego oparcia dla użytkownika t. obłożonego, mokrym, tłustym, ślisko zaplaskanym
6. Korzystanie z wózka jedynie na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła wózka dotykają podłoża oraz kontakt jest wystarczający aby odpowiednio napęścić koła
7. Nie stawianie na podnożki przy siadaniu w wózku - wcześniej należy podnożyć ztyłek lub całkowicie odsunąć na bok
8. Nie przenoszenie wózka wraz z użytkownikiem. Sam wózek należy przenosić chwytając za konstrukcję ramy siedziska. Nigdy nie należy przenosić wózka za podłokietniki, podnożki oraz rączki dla opiekuna
9. Zadażnięcie hamulców dla pacjenta przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka!
10. Nie przekraczanie maksymalnej wagi użytkownika (ciężar pacjenta kg) określonej przez producenta wózka (dla wybranego modelu)

W celu uniknięcia urazów:

1. Wózek musi być całkowicie rozłożony (po prawidłowym rozłożeniu musi wyglądać dokładnie jak na zdjęciu niniejszej instrukcji)
2. Niebezpieczeństwo jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego wózka przed jego użytkowaniem
3. Niedopuszczalne jest użytkowanie wózka, jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek widoczne lub niewidoczne uszkodzenia, albo stopień zużycia się części wózka wskazuje na potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku (np. zużycie kół jezdnych, pęknięcia tapicerki, itp.). Wszelkie naprawy wykwalifikowani kowaleni personeli, a w okresie gwarancji należy zgłaszać do producenta wózka
4. Każdorazowo należy wykonać stan techniczny hamulców (siłę hamowania). Hamulce nie służą do spowalniania wózka w trakcie jazdy należy ich używać wyłącznie aby nie dopuścić do nieogrzanych ruchów wózka
5. Hamulec dla pacjenta oraz hamulec dla opiekuna muszą być właściwie wyregulowane (właściwa siła hamowania, równomierna siła docisku, obrotu hamulców). Nieprawidłowe ustawienie jednego z hamulców dla pacjenta skutkujące zakłócaniem tylko jednego koła tylnego, co na dużych prędkościach może być przyczyną trudnego do oparcia obrócenia się wózka. Używanie hamulca dla pacjenta podczas jazdy może grozić wypadkiem ze wszystkich konsekwencjami
6. W przypadku zanieczyszczenia oparcia kół poprzez oleje, smary, wodę czy inne środki może nastąpić zmniejszenie efektywności hamowania
7. Po długiej eksploatacji wózek może wymagać osłabienia siły hamowania spowodowane powstaniem luzu między sworzniem dociskowym hamulca a oponą (ogumieniem) koła
8. Istnieje możliwość samodzielnego wyregulowania hamulców posiadających. W tym celu należy poluzować śruby blokujące położenie mechanizmu hamulca, przesunąć cały mechanizm w stronę koła do którego podłoża aby po ponownym dokręceniu hamulca koło nie obracało się (test poprawności regulacji przeprowadzić na wózku z pacjentem). Po zakończeniu regulacji ponownie zabezpieczyć połączenie mechanizmu hamulca śrubami blokującymi
9. Należy regularnie kontrolować ciśnienie w oponach. Przy zbyt niskim ciśnieniu w oponach niż zalecane skuteczność działania hamulców może znacznie się zmniejszyć. Zalecane ciśnienie w oponach - wartość podana na oponie koła
10. W przypadku wózków wyposażonych w koła pompowane nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego ciśnienia pompowania kół.
11. Wózek przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz, pomieszczeń wyłączenia się z wózka gdyż grozi to upadkiem (z boku, z przodu, z tyłu)
12. Wózek przeznaczony do transportu pacjenta po schodach, w charakterze noszy lub poprzez wciąganie na nim pacjenta
13. Wózek nie jest przeznaczony do transportu pacjenta po schodach, w charakterze noszy lub poprzez wciąganie na nim pacjenta
14. Poniższe są po powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność. Do pokonywania trudnych barier architektonicznych (strome lub długie podjazdy wysokie stopnie, itp.) niezbędna jest pomoc opiekuna
15. Wózek nie może być wykorzystywany do użycia jako siedzisko w pojeździe silnikowym (autobus, pociąg)
16. Korzystając z drogi publicznych, należy stosować się do przepisów ruchu drogowego
17. Nie pozostawiać pacjenta w wózku (nawet przy zaciągniętych hamulcach) na zjazdach, rampach, podjazdach itp.
18. Należy pamiętać, że temperatura powierzchniowa tapicerki i elementów ramy może wzrosnąć po wystawieniu na działanie słońca lub innego źródła ciepła, natomiast niskiej temperaturze zachodzi niebezpieczeństwo bardzo dużego wychłodzenia części metalowych wózka. To może być przyczyną oparzenia lub odmrożenia części ciała
19. W przypadku transportu wózka (np. w bagażniku samochodu) nie należy wózka niczym obciążać, nie kłaść na nim żadnych przedmiotów, może mieć to wpływ na jego konstrukcję
20. Należy zachować szczególną ostrożność przy składaniu wózka, brak uwagi może grozić przyrządzeniem palców przez elementy składające się
21. Zawsze przed rozkładaniem wózka należy upewnić się, że żadna część ciała pacjenta lub jego ubranie nie jest narażona na zaczepienie o ruchome części wózka
22. Należy zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu przeszkód (zjazdy) i podjazdy na krawężnik, pokonywanie progów, poruszanie się po powierzchniach pochyłych).

Szczegółowe należy ograniczyć prędkość

Sposób konserwacji:

Wózek należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów posiadających atest PZH. Po dokonaniu takiej czynności wózek należy wytrzeć/ osuszyć delikatną szmatką. Tapicerkę i ramę należy czyścić wilgotną ściereczką bez dodatku detergentów oraz innych podobnych środków (można odkurzać). Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia np.: nici włosy itp. z ruchomych elementów wózka (koła, podnożki). Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu (niezmienne ważne jest utrzymanie wszystkich jego elementów w czystości, oraz sposobu przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łazienki, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

Nie wolno używać środków ściernych! Nie wolno używać rozpuszczalników, środków czyszczących, środków z zawartością chloru ani innych „agresywnych” detergentów. NIE WOLNO myć wózka przy użyciu myjek ciśnieniowych lub parowych. Elementy gumowe (koła) są elementem zużywalnym i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia.

Hamowanie konserwacji:

Co tydzień Sprawdzić hamulec pod kątem awarii! sprawdzić wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętki osi! sprawdzić ciśnienie w kołach tylnych (dot. kół pneumatycznych) Cyklizację Sprawdzić podłokietniki, podnożki oraz inne elementy wózków pod kątem zużycia. Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, sprawdzić, czy śruba przedniej i tylnej osi są dokręcone (nie dot. szybkołączek), sprawdzić, zmniejszenie elementów pod kątem zużycia lub pęknięć. Sprawdzić ogólnie stan techniczny wózka.

Porozumiewanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy skontaktować się z producentem wózków. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wózka jest ZABRONIONE!! Grozi to wypadkiem

Wózek nie jest stabilny.

a. Czy obydwa koła tylne są prawidłowo zamontowane? Jeśli nie - należy je dopchnąć aż do wyraźnego „kliknięcia” zatrzasku „szybkołączki”

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



- Uchwyt dla opiekuna (1)
- Hamulec dla opiekuna (2)
- Zatrzaski (składanie oparcia) (3)
- Podłokietnik (4)
- Opony koła tylnego (5)
- Zatrzaski (składanie podłokietników) (6)
- Hamulec dla pacjenta (7)
- Aluminiowe ciągi (8)
- „Szybkołączki” kół tylnych (9)
- Stopki wspomagające podnoszenie (10)
- Widelce koła przedniego (11)
- Koło przednie (12)
- Oparcie (13)
- Pas biodrowy (14)
- Siedzisko (15)
- Rama siedziska (16)
- Zatrzaski (odchylanie i zdejmowanie podnożków) (17)
- Rama podnożka (18)
- Rama krzyżakowa (konstrukcyjna) (19)
- Śruby do regulacji wysokości podnożków (20)
- Pasy zabezpieczające stopy (21)
- Podnożki (22)



- Uchwyt dla opiekuna (1)
- Hamulec dla opiekuna (2)
- Podłokietnik (3)
- Opony koła tylnego (4)
- Zatrzaski (składanie podłokietników) (5)
- Hamulec dla pacjenta (6)
- Ciągi (7)
- „Szybkołączki” kół tylnych (8)
- Rama krzyżakowa (konstrukcyjna) (9)
- Widelce koła przedniego (10)
- Oparcie (11)
- Pas biodrowy (12)
- Poduszka na siedzisku (13)
- Siedzisko (14)
- Rama siedziska (15)
- Zatrzaski (odchylanie i zdejmowanie podnożków) (16)
- Rama podnożka (17)
- Pas podtrzymujący tyłki (18)
- Śruby do regulacji wysokości podnożków (19)
- Pasy zabezpieczające stopy (20)
- Koła anty-wywrótnie (opcjonalnie) (21)
- Podłokietnik (22)
- Koło przednie (23)



- Uchwyt dla opiekuna (1)
- Hamulec dla opiekuna (2)
- Zatrzaski (składanie rączęt) (3)
- Podłokietnik (4)
- Przyścisł (regulacja wysokości podłokietników) (5)
- Opony koła tylnego (6)
- Zatrzaski (składanie podłokietników) (7)
- Hamulec dla pacjenta (8)
- Aluminiowe ciągi (9)
- „Szybkołączki” kół tylnych (10)
- Koła anty-wywrótnie (11)
- Mini koła dojazdowe (12)
- Oparcie (13)
- Pas biodrowy (14)
- Poduszka na siedzisku (15)
- Siedzisko (16)
- Pas podtrzymujący tyłki (17)
- Rama podnożka (18)
- Śruby do regulacji wysokości podnożków (19)
- Rama krzyżakowa (konstrukcyjna) (20)
- Widelce koła przedniego (21)
- Podłokietnik (22)
- Koło przednie (23)
- Koło przednie (24)

Incydenty:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Uwaga:

Wyrob nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.