

Eventualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw wózek w miejscu gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, silne nasłonecznienie)
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja: Wyrob nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Dane Techniczne:	
PARAMETR:	AR-400
Rama / kolor:	stalowa / srebrny metalic
Typ / model:	składany, rama krzyżakowa
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.):	109x66x94 cm (dla rozm. 46cm inny +/-2cm)
Waga średnia produktu:	18.5 kg
Maksymalne obciążenie:	120 kg
Wyposażenie standardowe	Nylonowe oparcie i siedzisko (torba/kieszeń na oparciu). Poduszka do siedzenia. Pas na siedzisku ułatwiający składanie. Uchylne odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Pas stabilizujący łokcie. Uchylne i odpinane podłokietniki. Hamulec dla pacjenta. Ergonomiczne uchwyty dla opiekuna. Kola przednie – bezobsługowe. Kola tylnie – pompowane („szybkobieżki”) (Opcjonalnie) – kola tylnie pełne.

SYMBOLE:	CE	!	LOT	!	!
 Wyrob medyczny	 Wyrob spełnia wymagania UE	 Ostrzeżenie	 Nr daty / serii	 Nadaje się do recyklingu	 Selektowna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA	
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu	
Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Data sprzedaży	
Nr faktury zakupu	
Nr LOT	
Nazwa i nr katalogowy produktu	
Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	Okras gwarancji
Numer ewidencyjny zlecenia	*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwycięzcom 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy niezwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ściereczkę, koła, uchwyty i tworzywa).
6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wózka niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancji.
9. Reklamacja należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie udotowarcia warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.

Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

WÓZKI INWALIDZKIE STALOWE



AR-400 Wózek inwalidzki stalowy
OPTIMUM

AR-403 Wózek inwalidzki stalowy
ELEGANT

AR-405 Wózek inwalidzki stalowy
REGULAR

