



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-167AO Elastyczny stabilizator stawu skokowego z otwartą piętą.  
IMMOBILO SOFT-AO**

**Właściwości wyrobu:** Stabilizator wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Zastosowany Spandex gwarantuje niezwykłą wytrzymałość wyrobu oraz doskonałą kompresję, która nie ulega osłabieniu wraz z dłuższym czasem stosowania. Miękkie strefy (cieniowana tkanina) zapewniają wysoki komfort użytkowania. Rozciągliwość tkaniny w 4 kierunkach zapewnia jej wysoką elastyczność, doskonale przyleganie do anatomicznych kształtów kończyny oraz solidny efekt kompresji.

**Zastosowanie:** Stabilizator stosowany jest w celu zmniejszenia bólu w obrębie stawu skokowego, wywołanego przez zapalenie stawu, dolegliwości przeciążeniowe lub inne dysfunkcje. Szczególnie polecany w procesie doleczenia skręceń jak również stłuczeń kostki. Polecany w przypadku lekkiej niestabilności stawu skokowego spowodowanej urazem. Polecany przy artrozie, zapaleniu stawów oraz chorobach zwyrodnieniowych. Stanowi doskonały środek prewencyjny zapobiegający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji. Dzięki konstrukcji otwartej na pięcie idealnie przylega do kostki gwarantując doskonałą stabilizację i ochronę stawu.

**⚠️ Przeciwwskazania:** Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran, problemów krążeniowych. Nie stosować stabilizatora po poprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

**⚠️ Ostrzeżenie:** Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

**Instrukcja użytkowania:** Stabilizator należy naciągnąć na kończynę w taki sposób aby znalazł się w przeznaczonym dla niego miejscu (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Stosować jedynie wg przeznaczenia. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru, zbyt mały rozmiar może doprowadzić do silnego ucisku ograniczającego krążenie w stopie. Rozmiar zbyt duży spowoduje brak kompresji (ucisku) tym samym stabilizator nie spełni swoich określonych funkcji.

**Sposób konserwacji:** Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Rozmiary:** (mierzyć obwód wokół kostki)

S: 19,7–21,6cm, M: 22,2–24,1cm, L: 25,4–27,9cm, XL: 29,2–31,8cm, XXL: powyżej 33,0cm

**Skład:** 40% Poliester, 35% Nylon, 20% Guma elastyczna, Spandex 5%

**Utylizacja:** Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:** W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

**Incydenty:** Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

## KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejnymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

## SYMBOLE:



Wyrób medyczny    Zapoznaj się z instrukcją    Producent    Wyrób spełnia wymagania UE    Ostrzeżenie    Nr dato / serii    Data produkcji m-c/rok    Nadaje się do recyklingu    Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia 01.09.2023r.



**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

