



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-205H Orteza stawu skokowego. IMMOBILO EXO-STAB

Właściwości wyrobu: Wykonana z innowacyjnego materiału siatkowego MESH, z miękką wyściółką przyjazną w dotyku. Materiał oddychający, szybkoschnący, redukujący nieprzyjemne zapachy, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci. Wyposażona w wyprofilowane, zintegrowane z systemem sznurowania panele boczne. Panele wykonane z tworzywa o odpowiedniej plastyczności zapewniają idealne dopasowanie do kończyny oraz bardzo solidną stabilizację. Orteza wyposażona w unikalny, prosty i jednocześnie bardzo intuicyjny system sznurowania. Poszczególne, niezależne sznurówki nie wymagają ich tradycyjnego wiązania a jedynie dociągnięcia do zadanej siły stabilizacji i zapięcia na rzep. Ponadto orteza wyposażona w system nieelastycznych taśm dociągowych (zapinanych ósemkowo na rzepy) w celu wzmocnienia stabilizacji i jeszcze lepszej ochrony stawu skokowego. Zarówno sznurówki oraz taśmy dociągowe umożliwiają dopasowanie siły docisku oraz stabilizacji do indywidualnych preferencji oraz potrzeb użytkownika, ponadto zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Otwory na piętę oraz palce dają uczucie komfortu użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Orteza stawu skokowego stosowana jest w celu stabilizacji stawu skokowego. Zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi (do wewnątrz) i inwersyjnymi (na zewnątrz). Zalecana szczególnie przy skręceniu lub zwłknięciu stawu skokowego, uszkodzeniu więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego, zwyrodnieniach, zniekształceniach i niestabilności, w skręceniu stawu piszczelowo – skokowego, odciążeniu ścięgna Achillesa oraz w procesie doleczenia przebytych urazów. Stosowana również z profilaktyce ponownych urazów, zapobieganiu przeciążen zawodowych i sportowych.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran, złamań w obrębie stawu skokowego. Nie stosować ortezy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć ortezę w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep dociągowe (ósemkowe) oraz rzepy dociągające sznurówki. Rozluźnić sznurówki aby ułatwić swobodne włożenie stopy. Włożyć stopę jak do buta. Sprawdzić czy materiał w części piętowej oraz przedniej są wyprostowane (nie podwinęte). Należy zapiąć rzepy dociągające sznurówki (przypinając je do części bocznej, pionowej ortezy) a następnie dociągowe taśmy nieelastyczne (ósemkowe) z odpowiednim wyregulowaniem siły docisku. Taśmy dociągowe (ósemkowe) należy zapinać kolejno pod stopą, wokół kostki (pod skosie) do pionowego rzepu z prawej i lewej strony ortezy. Należy pamiętać aby orteza była zapięta z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie powodowała bólu oraz dużego dyskomfortu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania ortezy winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (obwód mierzony przez piętę i staw skokowy - po skosie). **UNIWERSALNA: PRAWA lub LEWA noga.**

XS: 28-30,5cm, S: 30,5-33cm, M: 33-35,5 cm, L: 35,5-38 cm, XL: 38 -40,5 cm

Skład: 57% Nylon, 25% Termoplastyczny Poliuretan, 10% Polipropylen, 8% Poliester

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia XXXXXXXX



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

