



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-208A Orteza kciuka z szyną aluminiową.
IMMOBILO THUM-B**

Właściwości wyrobu: Orteza wykonana z innowacyjnego neoprenu. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika. Gwarantuje komfort użytkownika dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Dzięki dodatkowej dociągającej, nieelastycznej taśmie VELCRO z klamrą, istnieje możliwość idealnego dopasowania siły docięcia na nadgarstku. Wyposażona w specjalnie wyprofilowaną szynę aluminiową, która doskonale stabilizuje kciuk. Zastosowanie mini taśmy VELCRO na kciuku zapewnia utrzymanie ortezy na właściwej pozycji.

Zastosowanie: Orteza kciuka stosowana jest szczególnie jako unieruchomienie w procesie doleczenia, zwichnięć oraz złamań kciuka. Jak również w przypadku zmian zwyrodnieniowych, kciuku „narciarza”, przy urazach stawu śródręczno-paliczkowego oraz chorobach zwyrodnieniowych. Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz kciuka, zapewnia doskonałą ochronę przed powstawaniem nowych urazów.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą. Czas stosowania ortezy również winien być określony przez specjalistę.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy rozpiąć rzepy, następnie wsunąć dłoń w ortezę (jak w rękawiczkę). Ortezę należy założyć tak, aby szyna anatomiczna znajdowała się po stronie zewnętrznej kciuka. Następnie dopiąć rzep mocujący na nadgarstku pamiętając o właściwej sile ucisku, nie utrudniającej krążenia. Po założeniu ortezy należy dopiąć mini rzep górny.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14,0-16,5cm, M: 16,5-19,0cm, L: 19,0-21,6cm, XL: 21,6 cm i więcej

Skład: 60% Neopren, 25% Nylon, 10% Poliester, 5% Guma

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, oleistymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

