



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-2181 Kamizelka na ramię i bark. IMMOBILO PREMIUM SHD

Właściwości wyrobu: Kamizelka wykonana z innowacyjnego, lekkiego, miękkiego oraz przyjemnego w dotyku materiału. Dzięki zastosowaniu materiału o odpowiednim składzie oraz strukturze jest on przewiewny i oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Jednocześnie materiał jest niezwykle twały, wytrzymały i nierozciągliwy zapewniając właściwą stabilizację i komfort użytkowania. Dzięki uszyciu z odpowiednio anatomicznie dopasowanemu krojowi oraz systemowi rzepów zapewnia skuteczną stabilizację umożliwiając jednocześnie stosowanie jej na prawe lub lewe ramię. Dodatkowa taśma z rzepem podtrzymująca dłoń wspomaga stabilizację oraz gwarantuje komfort podtrzymywanej kończyny.

Zastosowanie: Kamizelka na ramię i bark stosowana jest w celu stabilizacji stawu barkowego, ramiennego, łokciowego w pozycji odciążeniowej oraz wspomagania procesu doleczenia pourazowego lub pooperacyjnego. Zalecana szczególnie w procesie leczenia i doleczenia urazów obręczy barkowej, stawu ramiennego oraz stawu łokciowego. Stosowana przy złamaniach obojczyka, kości ramiennej, łopatk, zwichnięciach stawu barkowo-obojczykowego, ramiennego, łokciowego oraz mostkowo-obojczykowego jak również w zespołach bólowych, zwyrodnieniach, chorobach zapalnych wymagających unieruchomienia i odciążenia kończyny.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować kamizelki po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć kamizelkę w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzepy. Kamizelkę należy nałożyć na właściwy bark wymagający unieruchomienia, a następnie zapiąć szerokim rzepem pas piersiowy, opasując klatkę piersiową od tyłu do przodu. Następnie należy zapiąć przedni szeroki pas na klatce piersiowej podtrzymujący przedramię. Wąskim pasem od strony barkowej należy ustabilizować kończynę obejmując łokieć i dopinając go od spodu przedramienia. Kolejno dopiąć pas stabilizujący łokieć (od tyłu do przodu). Dopiąć dodatkowy wąski rzep z przodu podtrzymujący kończynę (w okolicach nadgarstka) do części piersiowej kamizelki. Postępować zgodnie z poniższą ilustracją. W celu zapewnienia właściwej stabilizacji należy szczególnie dobrze dobrać wymagany rozmiar.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

S: 60-70 cm, M: 70-80 cm, L: 80-90 cm, XL: 90-105 cm, XXL: 105-120 cm, XXXL: 120-135 cm

Skład: 50% Nylon, 40% Pianka PU, 10% Poliester

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać używać wyrobów.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr daty / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

