

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA****AR-6660 Neoprenowy stabilizator stawu łokciowego - zapinany
IMMOBILO NEO**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z innowacyjnego neoprenu. Unikalna struktura materiału daje uczucie komfortu, zapobiega przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika, zapewnia komfort użytkownika dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry, jednocześnie doskonale przylega do stawu. Materiał gwarantujący niezwykłą wytrzymałość wyrobu oraz doskonałą kompresję. Dzięki konstrukcji zapinanej taśmy posiada możliwość regulacji siły kompresji. Zapewnia doskonale przyleganie do anatomicznych kształtów kończyny.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest w celu zmniejszenia bólu w obrębie stawu łokciowego, wywołanego przez zapalenie stawu, dolegliwości przeciążeniowe lub inne dysfunkcje. Szczególnie polecany w procesie doleczenia urazów, jak również dla osób cierpiących na zmiany o charakterze zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym. Polecany w przypadku lekkiej niestabilności stawu łokciowego spowodowanej urazem. Stanowi doskonały środek prewencyjny zapobiegający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran, problemów krążeniowych. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Stabilizator należy zapiąć na kończynę ((zwinąć wokół kończyny i zapiąć na rzep) w taki sposób aby znalazł się w przeznaczonym dla niego miejscu (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Stosować jedynie wg przeznaczenia. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie siły kompresji (siły naciągnięcia neoprenu podczas owijania) zbyt mocne może doprowadzić do silnego ucisku ograniczającego krążenie w ręce. Zbyt luźne zapięcie spowoduje brak kompresji (ucisku) tym samym stabilizator nie spełni swoich określonych funkcji.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary:
UNIWEERSALNY

Skład: 70% Neopren, 30% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

**Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.**

SYMBOLE:

Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

