



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-762 Tkaninowy stabilizator stawu barkowego - zapinany.
IMMOBILO SS-F**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Zastosowany materiał zapewnia doskonałe przyleganie do stawu. Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Konstrukcja stabilizatora gwarantuje brak dyskomfortu związanego z uciskiem na klatkę piersiową oraz uwieraniem pod ramieniem. Ponadto posiada dwu-rzepową regulację obwodu na ramieniu co umożliwia lepsze dopasowanie wyrobu do anatomicznych kształtów ciała. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkownika.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest w celu znacznego ograniczenia ruchomości stawu barkowego po urazach, jako leczenie zachowawcze niestabilności pourazowej po przednim bądź tylnym zwinięciu stawu ramienne. Zalecany przy zwinięciu stawu barkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgna, zapaleniu kaletki maziowych. Szczególnie polecany w procesie doleczenia stanów pourazowych stawu, podczas rehabilitacji barku z bolesną hiperlaksją lub niestabilnością funkcjonalną, zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu, przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń wywołanych osteoporozą. Stosowany jako środek prewencyjny przeciwdziałający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku złamań. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmiernie długie stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje i wydłużyć proces rehabilitacji. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiekolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy włożyć ramię w zszytą część stabilizatora - odpowiednio ułożyć na barku i pod ramieniem. Następnie należy zapiąć rzep główny, obwodowy stabilizatora pod ramieniem (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Kolejno, za pomocą rzepów dopasować rozmiar (obwód) na ramieniu. Należy dopasować się unieruchomienia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary (mierzyć obwód wokół klatki piersiowej):

S/M 84,0-96,5 cm, L/XL 96,5-114,0cm

Zastosowanie: na PRAWE lub LEWE ramię

Skład: 70% Włókno Ceramiczne (Far Infrared Rays), 12% Guma, 10% Poliester, 8% Spandex

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać używać wyrobów.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

