



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-G-2060 Neoprenowy stabilizator łokcia tenisisty z poduszką silikonową. IMMOBILO EHR-MAX**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z innowacyjnego neoprenu. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika. Gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Dzięki zastosowaniu silikonowej poduszki stanowi doskonałe zabezpieczenie przed powstawaniem urazów związanych z tzw. łokciem tenisisty. Poduszka silikonowa wykonuje mikromasaż, który stanowi wsparcie dla ścięgien zginaczy stawu łokciowego, zmniejszając napięcie mięśniowe i dolegliwości bólowe. Dzięki nieelastycznej taśmie VELCRO z klamrą, istnieje możliwość idealnego dopasowania siły ucisku do preferencji użytkownika. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkownika.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest w schorzeniach związanych z przeciążeniem mięśni oraz ścięgien przedramienia. W schorzeniach tzw. „łokieć tenisisty” oraz „łokieć golfisty”. Szczególnie polecany w zapaleniu nadkłykcia, służy do odciążenia przyczepów początkowych mięśni. Poduszka silikonowa wywiera ucisk poniżej stawu łokciowego na brzusiec mięśni prostowników, zginaczy, dzięki czemu znacznie odciąża przeciążone przyczepy początkowe mięśni. Wywierany ucisk może zmniejszać bóle związane z wykonywanym ruchem. Stosowany jest również w celach profilaktycznych, jako zabezpieczenie przed nawracającymi kontuzjami lub zapobieganie powstawaniu nowych urazów. Zastosowana taśma VELCRO umożliwiła indywidualne dopasowanie ucisku do na przedramię.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Stabilizatorem należy owinać przedramię (poduszką do góry) a następnie zapiąć rzep główny znajdujący się na materiale neoprenowym. Następnie należy owinać taśmą dociągającą aby wzmocnić stabilizację i dopasować siłę unieruchomienia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Taśmę dociągającą należy przełożyć przez klamrę i zapiąć na rzep.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: UNIWERSALNY

Skład: 60% Neopren, 25% Nylon, 10% Poliester, 5% Guma

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

