



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-167K Elastyczny stabilizator stawu kolanowego.  
IMMOBILO SOFT-K**

**Właściwości wyrobu:** Stabilizator wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Zastosowany Spandex gwarantuje niezwykłą wytrzymałość wyrobu oraz doskonałą kompresję, która nie ulega osłabieniu wraz z dłuższym czasem stosowania. Miękkie strefy (cieniowana tkanina) zapewniają wysoki komfort użytkowania. Rozciągliwość tkaniny w 4 kierunkach zapewnia jej wysoką elastyczność, doskonale przyleganie do anatomicznych kształtów kończyny oraz solidny efekt kompresji.

**Zastosowanie:** Stabilizator stosowany jest w celu zmniejszenia bólu w obrębie stawu kolanowego, wywołanego przez zapalenie stawu, dolegliwości przeciążeniowe. Szczególnie polecany w procesie doleczenia uszkodzeń ścięgien, mięśni oraz więzadeł kolana. Polecany w przypadku lekkiej niestabilności stawu kolanowego spowodowanej urazem. Zapewnia delikatną kompresję na rzepkę kolanową. Stanowi doskonały środek prewencyjny zapobiegający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

**⚠️ Przeciwwskazania:** Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran, problemów krążeniowych. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

**⚠️ Ostrzeżenie:** Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

**Instrukcja użytkowania:** Stabilizator należy naciągnąć na kończynę w taki sposób aby znalazł się w przeznaczonym dla niego miejscu (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Stosować jedynie wg przeznaczenia. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru, zbyt mały rozmiar może doprowadzić do silnego ucisku ograniczającego krążenie w kończynie. Rozmiar zbyt duży spowoduje brak kompresji (ucisku) tym samym stabilizator nie spełni swoich określonych funkcji.

**Sposób konserwacji:** Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielacza, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Rozmiary:** (mierzyć obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części)  
S: 25,4-28,0cm, M: 28,0-33,0cm, L: 33,0-38,0cm, XL: 38,0-43,0cm, XXL: powyżej 43,0 cm

**Skład:** 40% Poliester, 35% Nylon, 20% Guma elastyczna, Spandex 5%

**Utylizacja:** Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:** W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

**Incydenty:** Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

## KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć  
punktu sprzedaży  
i czytelny podpis.

## SYMBOLE:



Wyrób medyczny    Zapoznaj się z instrukcją    Producent    Wyrób spełnia wymagania UE    Ostrzeżenie    Nr dato / serii    Data produkcji m-c/rok    Nadaje się do recyklingu    Selektywna zbiórka odpadów

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx

