

format A6 - 105x148mm



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-2199 Temblak tkaninowy z miękkim naramiennikiem. IMMOBILO SLING MESH

Właściwości wyrobu: Temblak wykonany z innowacyjnego siatkowego materiału, który jest w pełni przewiewny, gwarantująca komfort termiczny nawet w upalne dni. Materiał niezwykle wytrzymały, nierozciągliwy, zapewniający stabilne podtrzymanie kończyny. Wyposażony w miękkie naramienniki, z regulacją położenia, zapobiegający otarciom szyi. Możliwość regulacji długości rzepu podtrzymującego, pozwala na idealne dopasowanie wysokości podtrzymania kończyny do indywidualnych potrzeb pacjenta. System zapinania na rzep ułatwia zakładanie, który jest łatwy i szybki. Zastosowana taśma podtrzymująca kciuk gwarantuje komfortową pozycję unieruchomienia. Dzięki zastosowaniu materiału siatkowego temblak zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Temblak stosowany jest w schorzeniach, dysfunkcjach oraz urazach wymagających podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości kończyny górnej oraz obręczy barkowej. Szczególnie polecany w zespołach bólowych stanach zapalnych i urazach. Zapewnia podtrzymanie kończyny górnej podczas noszenia opatrunku gipsowego. Stosowany również po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego.

⚠️ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku złamań bez uprzednio zastosowanego unieruchomienia np. gipsowego. Nie stosować temblaka po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠️ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy założyć temblak na rękę i przedramię, następnie przewlec taśmę podtrzymującą z rzepem przez plastikową pelotę. Wyregulować odpowiednio wysokość i zapiąć rzep. Ustawić miękkie naramienniki na właściwej pozycji, tak aby zabezpieczał szyję przed otarciami. Włożyć kciuk w „zawieszkę” z tasiemki dla większego komfortu.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

XS: poniżej 60cm, S: 60-75cm, M: 76-91cm, L: 92-107cm, XL: powyżej 107cm

Skład: 80% Poliester, 20% Polipropylen

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

