



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-2260 Pas brzuszny - zapinany.
IMMOBILO AB-PROTECTC**

Właściwości wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Zastosowany materiał zapewnia doskonałe przyleganie do kształtów ciała wraz z odpowiednią siłą kompresji. Dzięki zapinaniu pasa na rzep zakładanie jest niezwykle łatwe. Regulacja rzepem umożliwia dopasowanie odpowiedniej siły kompresji do wymagań i preferencji użytkownika. Zastosowany elastyczny materiał zapewnia idealne dopasowanie się do kształtu ciała oraz umożliwia swobodne poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności.

Zastosowanie: Pas brzuszny stosowany jest w celu zmniejszenia ryzyka powstawania i ograniczenia powiększania się już istniejącej przepukliny brzusznej. Stanowi ochronę i stabilizację po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, podtrzymuje skórę i organy wewnętrzne. Szczególnie polecany dla kobiet w okresie poporodowym, wzmacnia nadmierne rozszerzone w okresie ciąży powłoki brzuszne. Stosowany również w przypadku osłabionych mięśni brzucha, jako środek prewencyjny zmniejszający ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Czas stosowania powinien być ściśle określony przez lekarza lub fizjoterapeutę. Nie należy stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep, owinąć wokół brzucha od tyłu do przodu. Zapiąć rzep. Należy pamiętać o odpowiednim dopasowaniu siły kompresji. Pas nie może powodować dużego bólu spowodowanego nadmiernym uciskiem, dużego dyskomfortu, ograniczać swobodne oddychanie.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół pasa)

S: 56-71cm, M: 69-84cm, L: 81-96cm, XL: 94-109cm, XXL: 107-122cm, XXXL: 120-137cm

Wysokość: 28cm

Skład: 60% Poliester, 20% Elastic, 10% Nylon, 10% Pianka PU

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

