



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-227 Stabilizator obojczyka. IMMOBILO SUPPORT-8
IMMOBILO SUPPORT-8**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z miękkiego, przyjemnego w dotyku materiału z wypełnieniem piankowym. Wypełnienie piankowe gwarantuje brak ucisku w miejscu przylegania stabilizatora. Specjalna pelota grzbietowa idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała nie powodując ucisku. Szerokie naramienniki zapewniają komfort użytkowania wymuszając jednocześnie odpowiednią (wyprostowaną) pozycję ciała zapewniając stabilizację obojczyka. Dzięki zastosowaniu zapinania na rzepy, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest w celu unieruchomienia i stabilizacji po złamaniach obojczyka lub zwichnięciach barkowo-obojczykowych. Znacznego ograniczenia ruchomości stawu barkowego po urazach, jako leczenia zachowawcze niestabilności pourazowej. Szczególnie polecany przy złamaniach obojczyka. Stosowany również przy uszkodzeniach struktura otaczających obojczyk. Polecany w procesie doleczenia stanów pourazowych, stosowany jako środek prewencyjny przeciwdziałający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

⚠️ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować jako korektora postawy (prostotrzymacz). Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne długie stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje i wydłużyć proces rehabilitacji. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠️ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy bardzo luźno zapiać stabilizator w kształt 8emki, następnie ubrać na plecy (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Odpowiednio ułożyć na ramionach. Kolejno należy rozpinać luźno zapięte rzepy i dociągać dopinając pod pachami. Należy wyregulować prawą i lewą stronę. Pelota grzbietowa powinna znajdować się pomiędzy łopatkami. Należy dopasować siłę unieruchomienia do indywidualnych potrzeb użytkownika. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania pasa winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

S: 54,0-63,8 cm, M: 64,1-76,5cm, L: 76,8-89,2cm, XL: 89,5-104,5cm

Skład: 40% Poliester, 40% Pianka PU, 10% Nylon, 10% Akryl

Utylizacja: Wyrób nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

