



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**AR-228-1S Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny.
IMMOBILO HERNIA-1**

Właściwości wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnych materiałów. Materiał pokrywający pelotę (od strony wewnętrznej), miękki, delikatny i oddychający. Umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Dopinana pachwinowa taśma z Velcro - wąską, z zaokrąglonymi krawędziami dla zwiększenia komfortu użytkowania. Pas główny niezwykle wytrzymały, o dużej kompresji, utrzymujący wyrób na właściwej pozycji. Pelota odpowiednio wyprofilowana, specjalny kształt zapewnia dopasowanie do anatomicznej budowy ciała i odpowiednie właściwości terapeutyczne. Wykorzystanie nowoczesnego systemu zapinania gwarantuje idealne przyleganie zapewniając przy tym komfort oraz solidną stabilizację. Nie stanowi trudności. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Pas przepuklinowy, pachwinowy stosowany jest w celu podtrzymania niewielkich przepuklin u pacjentów, którzy nie mogą być operowani. Stanowi zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych. Szczególnie polecany w przypadku przepuklin pachwinowych prawo lub lewo stronnych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Idealny przy wspomaganiu procesu leczenia i rehabilitacji niewielkich przepuklin pachwinowych oraz profilaktycznie przeciw nawrotom w przypadku słabego aparatu mięśniowo - więzadłowego prawostronnego lub lewostronnego.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwięźniętej, ponieważ może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita i opóźniać konieczność pilnego leczenia operacyjnego. Okres stosowania należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć pas w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzepy. Pas główny należy zapiąć na wysokości bioder. Do taśmy głównej przypiąć taśmę pachwinową – najpierw z przodu, dociskając odpowiednio odprowadzoną przepuklinę pachwinową, a następnie, prowadząc wzdłuż wewnętrznej części uda, zapiąć taśmę z tyłu. Należy pamiętać aby pas był zapięty z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie powodował bólu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania pasa winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół bioder)

S: 70-79cm, M: 80-90cm, L: 91-102cm, XL: 103-115cm, XXL: 116 – 130cm,

Skład: 40% Nylon, 30% Poliester, 20% Spandex, 10% Pianka EVA

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny



Zapoznaj
się z
instrukcją



Producent



Wyrób spełnia
wymagania
UE



Ostrzeżenie



Nr dato /
serii



Data
produkcji



Nadaje
się do
recyklingu



Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia 10.04.2024r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

