

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA****AR-5650 Neoprenowa orteza rzepki.
IMMOBILO PATELLA**

Właściwości wyrobu: Orteza wykonana z innowacyjnego neoprenu. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika. Zapewnia komfort użytkownika dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Zastosowana wewnętrzna pólśzywna tulejkowa wkładka gwarantuje solidne podparcie rzepki, wywierając jednocześnie miejscowy nacisk na więzadło własne rzepki. Zastosowany materiał zapewnia doskonale przyleganie do stawu. System zapinania na rzep ułatwia zakładanie, który jest łatwy i szybki.

Zastosowanie: Orteza stosowana jest szczególnie przy zespole udowo-rzepakowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hiperмобиłości bliższego stawu strzałowo-piszczałowego. Polecana również w przypadku naderwania i naciągnięcia przyczepu piszczelowego mięśnia czworogłowego uda, złamaniach rzepki oraz w leczeniu zachowawczym i profilaktyce przeciążeń i urazów. Zapewnia doskonale podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny, rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki oraz odciążenie stawu rzepakowo-udowego.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować w przypadku uszkodzenia więzadła własnego rzepki oraz stanów wymagających stabilizacji bocznej rzepki. Nie stosować ortez po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiekolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep a następnie nałożyć na kończynę (pod rzepką), przewlec pasek z rzepem przez plastikową pelotę. Wyregulować odpowiednio siłę ucisku i zapiąć pasek na rzep. Siła ucisku powinna zapewniać uciśnięcie więzadła własnego rzepki, nie powodując przy tym bólu, efektu drętwienia – zapewniając swobodne krążenie krwi w kończynie.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: UNIWERSALNY

Skład: 50% Neopren, 30% Nylon, 10% Polietylen, 10% Pianka EVA

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

**Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.**

SYMBOLE:

Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

