



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-6630 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego, zapinany, krótki.
IMMOBILO FLEXI-S**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z innowacyjnego neoprenu. Unikalna struktura materiału daje uczucie komfortu, zapobiega przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika, zapewnia komfort użytkownika dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry, jednocześnie doskonale przylega do stawu. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym, zastosowany gruby pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki. Dzięki konstrukcji otwartej, zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Jednocześnie system zapinania gwarantuje możliwość idealnego dopasowania siły stabilizacji.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest szczególnie w urazach stawu kolanowego, lekkiej niestabilności, reumatycznych stanach zapalnych, lekkiej niewydolności więzadeł jak również przy zespole udowo-rzepkowym. Polecany również w przypadku zwichnięcia rzepki, pourazowej niestabilności w stawie rzepkowo-udowym oraz w leczeniu zachowawczym i profilaktyce przeciążeń i urazów. Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu. Zapewnia solidną stabilizację stawu oraz ochronę rzepki dzięki pierścieniowi z masy silikonowej, przeciwdziałając powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiekolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy rozpiąć rzepy a następnie nałożyć na kończynę, środek otworu winien znajdować się na środku rzepki. W pierwszej kolejności należy dopiąć podkolanowy pasek z rzepem a następnie kolejno górny oraz dolny (owijając wokół kończyny i zapinając na rzep). Wyregulować odpowiednio siłę ucisku. Siła zapięcia powinna zapewniać solidną stabilizację stawu kolanowego jednocześnie nie powodując przy tym bólu, efektu drętwienia – zapewniając swobodne krążenie krwi w kończynie.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: UNIWERSALNY

Długość: 17cm

Zastosowanie: na PRAWĄ lub LEWĄ NOGĘ

Skład: 70% Neopren, 30% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

