

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA****AR-722W Pas lędźwiowy - stabilizujący.
IMMOBILO SAFE-WORK**

Właściwości wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnego materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Dzięki zastosowaniu (w tylnej części) czterech stalek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. Stalki o odpowiedniej elastyczności zapewniają doskonałe przyleganie i właściwe dopasowanie pasa do anatomicznych kształtów ciała. Wykorzystanie nowoczesnego systemu dociągowego gwarantuje idealne przyleganie zapewniając przy tym komfort oraz bardzo solidną stabilizację. Dzięki dodatkowemu szelkom pas pozostaje we właściwej pozycji w czasie wykonywania różnych czynności np. chodzenia, kucania, siadania oraz zginania. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Pas lędźwiowy stosowany jest w celu stabilizacji okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Zalecany szczególnie w procesie rehabilitacji pourazowej, zespołach przeciążeniowych, zmianach zwyrodnieniowych, kręgotnyku, dyskopatii, rwie kulszowej. Stosowany również w przypadku napięcia mięśni grzbietu powodującego ból oraz zespołach neuropatycznych i korzeniowych. Szczególnie polecany dla osób wykonujących ciężkie prace fizyczne, chcących odciążyć kręgosłup, efektywnie zmniejszyć bóle korzonkowe, zapewnić solidną stabilizację przeciwdziałając powstawaniu urazów oraz kontuzji. Stanowi zabezpieczenie kręgosłupa oraz mięśni przed przeciążeniami.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć pas w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep główny oraz rzepy dociągające. Pasmem należy owinąć tułów w kierunku od tyłu do przodu na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (rzep „ostry” zapinany od prawej do lewej). W pierwszej kolejności należy zapiąć rzep główny a następnie rzepy taśm dociągowych z odpowiednim wyregulowaniem siły docisku. Zapiąć i wyregulować szelki. Należy pamiętać aby pas był zapięty z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie utrudniał swobodnego oddychania i nie powodował bólu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania pasa winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielacza, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół pasa)

S: 71-1-81,2cm, M: 83,8-93,9cm, L: 96,5-106,6 cm, XL: 109,2-121,9 cm, XXL: 124,4 – 134,4 cm,

Skład: 46% Poliester, 34% Nylon, 20% Spandex

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr daty / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

