



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-7600 Pas żebrowy - damski.
IMMOBILO RIB-D**

Właściwości wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Połączenie nierozciągliwego piankowego materiału w części przedniej oraz elastycznego i kompresyjnego w części tylnej, gwarantuje doskonale przyleganie do anatomicznych kształtów ciała, zapewniając przy tym komfort, bardzo solidny efekt kompresji oraz stabilizację. Zastosowane materiały gwarantują solidną kompresję, która nie ulega osłabieniu wraz z dłuższym czasem stosowania. Zapinanie na rzep umożliwia regulację siły kompresji. Odpowiednie wyprofilowanie pod piersiami oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Pas żebrowy stosowany jest w celu stabilizacji żeber poprzez kompresję klatki piersiowej. Skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeber redukując ból przy stanach zapalnych, stłuczeniach oraz złamaniami (w czasie głębszych wdechów), przyspiesza gojenie, zwiększa propriocepcję po urazach. Zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji, szczególnie polecany przy złamaniach, pęknięciach żeber i mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach opłucnej. Może być również stosowany w procesie dalszego doleczenia po operacjach w obrębie klatki piersiowej.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po poprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni klatki piersiowej, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć pas w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep, pasem należy owinąć klatkę piersiową w kierunku od tyłu do przodu na wysokości mostka a następnie zapiąć rzep. (rzep „ostry” zapinany od prawej do lewej). Zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu. Należy pamiętać aby pas był zapięty z siłą zapewniającą skuteczną kompresję, stabilizację ale jednocześnie nie utrudniał swobodnego oddychania i nie powodowała bólu oraz dużego dyskomfortu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Czas stosowania pasa winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary (wysokość 16cm):
UNIwersalny

Skład: 45% Nylon, 30% Poliester, 15% Pianka PU, 10% Spandex,

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

