



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-780 Gorset stabilizujący - unieruchamiający. IMMOBILO PERFECT

Właściwości wyrobu: Gorset wykonany z innowacyjnych materiałów. Materiał oddychający, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Dzięki zastosowaniu (w tylnej części) stąlek oraz specjalnej konstrukcji nie elastycznych taśm dociągowych zapewnia niezwykle skuteczną stabilizację kręgosłupa. Stalki o odpowiedniej elastyczności oraz półelastyczny materiał na bokach zapewniają doskonale przyleganie i właściwe dopasowanie pasa do anatomicznych kształtów ciała. Wykorzystanie nowoczesnego systemu podwójnego dopinania (rzep główny oraz boczne taśmy dociągowe) gwarantuje idealne przyleganie zapewniając przy tym komfort oraz bardzo solidną stabilizację. Użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania oraz bardzo estetyczny wygląd.

Zastosowanie: Gorset stabilizujący - unieruchamiający stosowany jest w celu stabilizacji okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Stosowanych w przypadkach wymagających bardzo mocnej i solidnej stabilizacji. Zalecany szczególnie w procesie rehabilitacji pourazowej, w leczeniu pooperacyjnym, złamaniach patologicznych trzonu kręgu, zespołach przeciążeniowych, zmianach zwyrodnieniowych, kręgozmyku, dyskopatii. Stosowany również w przypadku napięcia mięśni grzbietu powodującego ból oraz zespołach neuropatycznych i korzeniowych.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć gorset w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep główny oraz rzepy dociągające. Gorsetem należy owinać tułów w kierunku od tyłu do przodu na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (rzep „ostry” zapinany od prawej do lewej). W pierwszej kolejności należy zapiąć rzep główny a następnie rzepy taśm dociągowych z odpowiednim wyregulowaniem siły docisku. Należy pamiętać aby gorset był zapięty z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie utrudniał swobodnego oddychania i nie powodował bólu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania gorsetu winien być precyzyjnie określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół pasa)

S: 76-86,5 cm, M: 87,5-99 cm, L: 100-113 cm, XL: 114-128 cm, XXL: 129-133 cm

Wysokość: 30cm

Skład: 65% Poliester, 35% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zętknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejnymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny Zapoznaj się z instrukcją Producent Wyrób spełnia wymagania UE Ostrzeżenie Nr dato / serii Data produkcji m-c/rok Nadaje się do recyklingu Selektywna zbiórka odpadów



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx

