



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-781 Orteza łędwiowo-krzyżowa. IMMOBILIO PRO-25

Właściwości wyrobu: Orteza wykonana z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i niezwykle przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Dzięki zastosowaniu (w tylnej części) czterech stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. Stałki o odpowiedniej elastyczności oraz niezwykle miękki i elastyczny materiał zapewniają doskonale przyleganie i właściwe dopasowanie ortozy do anatomicznych kształtów ciała. Wykorzystanie nowoczesnego systemu dociągowego, gwarantuje idealne przyleganie zapewniając przy tym komfort oraz bardzo solidną stabilizację. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Orteza łędwiowo-krzyżowa stosowana jest w celu stabilizacji okolicy łędwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Zalecana szczególnie w procesie rehabilitacji pourazowej, w leczeniu pooperacyjnym, zespołach przeciążeniowych, zmianach zwyrodnieniowych, kręgozmyku, dyskopatii, rwie kulszowej. Stosowana również w przypadku napięcia mięśni grzbietu powodującego ból oraz zespołach neuropatycznych i korzeniowych. Stosowana również z profilaktyce ponownych urazów, zapobieganiu przeciążeniom zawodowych i sportowych.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować bezpośrednio na skórę. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Aby założyć ortezę w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep główny oraz rzepy dociągające. Orteza należy owinać tułów w kierunku od tyłu do przodu na wysokości odcinka łędwiowo-krzyżowego kręgosłupa (rzep „ostry” zapinany od prawej do lewej). W pierwszej kolejności należy zapiąć rzep główny a następnie rzepy elastycznych taśm dociągowych z odpowiednim wyregulowaniem siły docisku. Należy pamiętać aby orteza była zapięta z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie utrudniała swobodnego oddychania i nie powodowała bólu oraz dużego dyskomfortu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania ortozy winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół pasa)

S: 58.4-68.6 cm, M: 71-81.3cm, L: 83.8-94 cm, XL: 96.5-106.7 cm, XXL: 109.2 -119.4 cm, XXXL:121.9 -132.1cm

Wysokość: 25cm

Skład: 65% Bawełna, 35% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, oleistymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

