



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



AR-878 Orteza nadgarstka – długa. IMMOBILO WRIST-L

Właściwości wyrobu: Wykonana z innowacyjnego materiału. Materiał oddychający, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci. Zastosowanie trzech elementów stabilizujących (anatomicznie wyprofilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbiniami) oraz wykorzystanie nowoczesnego systemu dociągowego zapewnia ściśle przyleganie ortozy oraz bardzo solidną stabilizację. Dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanej „łyżki” podpierającej, kończyna pozostaje unieruchomiona we właściwej pozycji anatomicznej. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Orteza nadgarstka stosowana jest w celu unieruchomienia stawu nadgarstkowego w pozycji anatomicznej. Zalecana szczególnie przy zwichnięciu stawu nadgarstkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien, zwyrodnieniach stawu nadgarstkowego, zniekształceniach i niestabilności nadgarstka oraz w procesie dołączania złamań kości przedramienia oraz nadgarstka.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. ołarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować ortozy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Ortezę należy założyć tak, aby szyna anatomiczna znajdowała się po stronie dloniowej ręki, kciuk przechodził przez otwór, a rzepy znajdowały się od strony grzbietowej ręki. Następnie dopiąć rzepy mocując pamiętając o właściwym ucisku. Po założeniu ortozy można dopasować odpowiednią długość rzepów skracając nadmiar nożyczkami.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14-16.5 cm, M: 16.5-19 cm, L: 19-21.6 cm, XL: 21.6-24.1 cm

Długość: 27cm

Skład: 65% Poliester, 35% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent

Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr daty / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

