

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA****AR-A-825 Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia - wciągana. IMMOBILO BRACE-RKW**

Właściwości wyrobu: Orteza wykonana z innowacyjnego neoprenu. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja materiału, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci. Dzięki otworowi (w tylnej części) przeciwdziała zwijaniu się materiału w miejscu ugięcia kolana. Orteza wyposażona w bardzo solidne (wymagane z kieszeni bocznych) dwuosiowe zawiasy z regulacją kąta zgięcia i wyprostu, które pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego. Regulacja kąta zgięcia i wyprostu umożliwia dostosowanie ruchomości stawu do etapu rehabilitacji. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortozy oraz siły stabilizacji. Otwór na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Zastosowany gruby pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową jej ochronę. Zastosowany materiał oraz kształt zapewnia doskonale przyleganie do stawu.

Zastosowanie: Orteza stosowana jest szczególnie w niestabilności stawu kolanowego, reumatycznych stanach zapalnych, lekkiej niewydolności więzadeł jak również przy zespole udowo-rzepkowym. Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością. Stosowana również w procesie doleczenia po zabiegach operacyjnych typu szycie łąkotki, rekonstrukcji więzadeł, po urazach stawu kolanowego typu skręcenie lub zwinięcie, które wymagają ustawienia określonej ruchomości w stawie tj. regulacji kątowej zgięcia i wyprostu. Zapobiega przeprostowi kolana, eliminuje bóle związane z zdrętwieniami i obrzękami zapewniając odciążenie stawu kolanowego. Polecana również w przypadku zwinięcia rzepki, pourazowej niestabilności w stawie rzepkowo-udowym oraz w leczeniu zachowawczym i profilaktyce przeciążeń i urazów.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie stosować ortozy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku złamań śródstawowych, pęknięć, strzałki, kości udowej. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmierne długie stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje i wydłużyć proces rehabilitacji. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy ustawić właściwe kąty zgięcia oraz wyprostu poprzez umieszczenie bolców w otworach oznaczonych pożądanym zakresem. Następnie rozpiąć wszystkie rzepy obwodowe oraz rzepy na udzie i wsunąć kończynę do ortozy, środek otworu winien znajdować się na środku rzepki a zawiasy z boku. Następnie zapiąć 4 rzepy obwodowe. Siła zapięcia powinna uniemożliwiać zsuwanie się ortozy oraz zapewniać solidną stabilizację stawu kolanowego jednocześnie nie powodując przy tym bólu, efektu drętwienia – zapewniając swobodne krążenie krwi w kończynie.

Sposób konserwacji: Prac ręczną w temperaturze do 40°C (po wyjęciu zawiasów bocznych). Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prac chemicznie.

Rozmiary: (obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części) - na **PRAWĄ** lub **LEWĄ** nogę
S 31,0-33,0 cm, M 33,6-36,2cm, L 36,8-39,4 cm, XL 40,0-43,2 cm, XXL 43,8 -47,0 cm, XXXL 47,6 -51,4cm

Regulacja kąta zgięcia (flexion) i wyprostu (extension) 0°-75° (co 15°)

Skład: 60% 70% Neopren, 30% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:

Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia 10.04.2024r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

