

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA****AR-A-826 Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia - zapinana. IMMOBILO BRACE-RKZ**

Właściwości wyrobu: Orteza wykonana z innowacyjnego neoprenu. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja materiału, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika. Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzepkę oraz możliwość dopasowania ortozy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego. Ponadto gwarantuje niezwykle łatwe zakładanie nawet przy występowaniu dolegliwości bólowych (brak potrzeby wciągania ortozy przez stopę). Orteza wyposażona w bardzo solidne (wyjmowane z kieszeni bocznych) dwuosłowe zawiasy z regulacją kąta zgięcia i wyprostu, które pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego. Regulacja kąta zgięcia i wyprostu umożliwia dostosowanie ruchomości stawu do etapu rehabilitacji. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortozy oraz siły stabilizacji.

Zastosowanie: Orteza stosowana jest szczególnie w niestabilności stawu kolanowego, reumatycznych stanach zapalnych, lekkiej niewydolności więzadeł jak również przy zespole udowo-rzepakowym. Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością. Stosowana również w procesie doleczenia po zabiegach operacyjnych typu szcicie łątki, rekonstrukcji więzadeł, po urazach stawu kolanowego typu skręcenie lub zwinięcie, które wymagają ustalenia określonej ruchomości w stawie tj. regulacji kątowej zgięcia i wyprostu. Zapobiega przeprostowi kolana, eliminuje bóle związane z obrzękami zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego. Polecana również w przypadku zwinięcia rzepki, pourazowej niestabilności w stawie rzepakowo-udowym oraz w leczeniu zachowawczym i profilaktyce przeciążeń i urazów.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry, po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku złamań śródstawowych, pęknięć, strzałki, kości udowej. Nie stosować nadmiernie długo bez konsultacji ze specjalistą – nadmiernie długie stosowanie oraz brak wdrożonego programu ćwiczeń może doprowadzać do osłabienia mięśni, spowodować dodatkowe dysfunkcje i wydłużyć proces rehabilitacji. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy ustawić właściwe kąty zgięcia oraz wyprostu poprzez umieszczenie bolców w otworach oznaczonych pożądanym zakresem. Następnie należy rozpiąć 4 rzepy obwodowe oraz rzepy w materiale głównym (neoprenie). Następnie wsunąć złożoną ortezę pod wyprostowaną kończynę – „owinąć” staw kolanowy. Oś zawiasów bocznych winna znajdować się na wysokości osi rzepki. Dopiąć wszystkie 4 rzepy obwodowe. Wyregulować odpowiednio siłę ucisku. Siła zapięcia powinna uniemożliwiać zsuwanie się ortozy oraz zapewniać solidną stabilizację stawu kolanowego jednocześnie nie powodując przy tym bólu, efektu drętwienia – zapewniając swobodne krążenie krwi w kończynie.

Sposób konserwacji: Prac ręcznie w temperaturze do 40°C (po wyjęciu zawiasów bocznych). Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prac chemicznie.

Rozmiary: (obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części) - na **PRAWĄ** lub **LEWĄ** nogę
S 31,0-33,0 cm, M 33,6-36,2 cm, L 36,8-39,4 cm, XL 40,0-43,2 cm, XXL 43,8-47,0 cm, XXXL 47,6-51,4 cm

Regulacja kąta zgięcia (flexion) i wyprostu (extension) 0°-75° (co 15°)

Skład: 60% 70% Neopren, 30% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:

Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr daty / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia xxxxxxxxxx



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

