

PARAMETRY TECHNICZNE:	Model AR-030
Rama: aluminiowa - składana	Wymiar całkowity szer. x dł: 65x61cm
Regulacja wysokości uchwytów: 81-95 (co 2,5 cm)	Szerokość po złożeniu: 20cm
Koła: Średnica 8" (20cm), przednie koło skrętne	pełne, bezobsługowe, anty-poślizgowe EVA
Waga: 4,60kg	Maksymalna waga użytkownika: 110 kg Maksymalne obciążenie torby na zakupy: 5kg
Wyposażenie standardowe:	Hamulec z funkcją postojową, nylonowa torba na zakupy, zapinana - rozmiar: 45x35x30cm

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu		
Nr LOT	Okres gwarancji
	Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*
	Numer ewidencyjny zlecenia	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa)
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania balkonika niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji balkonika, torby zamykanej na suwak)
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.



ARmedical[®]
HomeCare Line

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

BALKONIK TRÓJKOŁOWY ALUMINIOWY Z SIEDZISKIEM

Model: AR-030 SUPER LIGHT



ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI BALKONIK TRÓJKOŁOWY ALUMINIOWY Z SIEDZISKIEM

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

⚠️ Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na balkoniku, zaburzenia koordynacji, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

⚠️ Uwagi i ostrzeżenia:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (8) są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwie rączki balkonika (1) ustawione są na tej samej wysokości wraz z dokręconymi solidnie śrubami
3. Sprawdzenie czy balkonik posiada wszystkie trzy koła (13) i (14)
4. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone/ zamocowane (13) i (14)
5. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy balkonika są stabilnie ze sobą połączone (8)
6. Sprawdzenie czy zatrzask (7) blokujący składanie jest całkowicie zablokowany
7. Sprawdzenie czy śruba mocująca przednie koło (10) jest solidnie przykręcona

⚠️ W celu uniknięcia urazów:

1. Balkonik powinien być całkowicie rozłożony, zatrzask (7) pod siedziskiem (w przedniej części) musi być całkowicie zablokowany
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności balkonika przed użyciem
3. Uchwyty (rączki do pchania) (1) muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać balkonika tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
7. Każdorazowo balkonik musi być trzymany oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące uchwyty (1), możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyty hamulca (2).
8. Balkonik nie może być narażony na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np., bardzo silny mróz lub bezpośrednio silne działanie promieni słonecznych)
9. Nie wolno przeciążać balkonika, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia torby zamykanej na suwak (9)
11. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
12. Zabrania się samodzielnych napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, modyfikacji wyrobu przez użytkownika. GROZI WYPADKIEM. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonanych samodzielnie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w wyrobie oraz jego modyfikacji.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkownika należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Sposób konserwacji:

Balkonik należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Balkonik należy wytrzeć i osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe oraz elementy gumowe (koła, rączki) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Harmonogram konserwacji:

Co tydzień Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi.

Cyklicznie Sprawdź uchwyty pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruby przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć.

Rocznie Raz w roku wyślij swój balkonik do autoryzowanego serwisu, przeprowadź pełną kontrolę, czyszczenie, serwis i smarowanie wszystkich ruchomych części.


Instrukcja montażu - przygotowanie do użycia

Krok 1: otwórz i połóż ramę na podłodze.


Krok 2: włóż 2 rury uchwytów do pchania do ramy i zamocuj za pomocą 2 śrub z pokrętłem.

Krok 3: włóż tylne koła do ramy. Upewnij się przed użyciem, że zatrzaski wskoczyły w otwory w ramie i są solidnie zablokowane.

Krok 4: zamontuj przednie koło i przykręć je za pomocą śruby. Upewnij się, że „łeb” śruby jest prawidłowo osadzony w otworze.

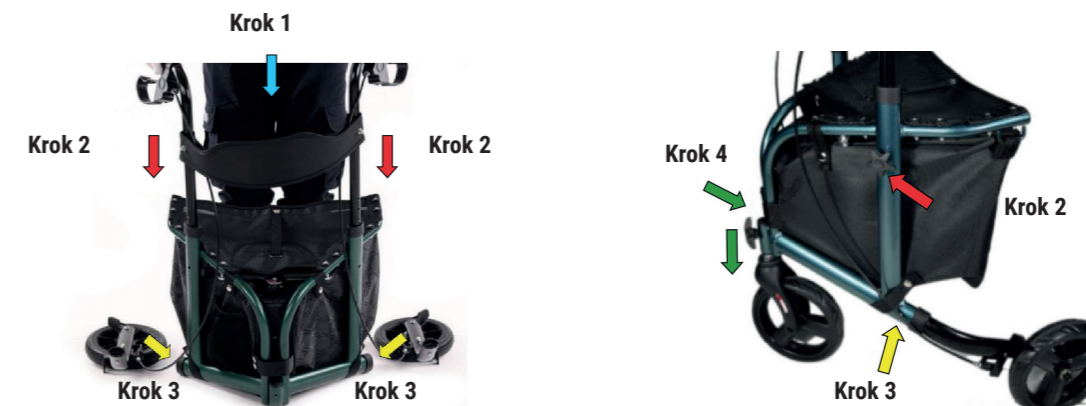

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

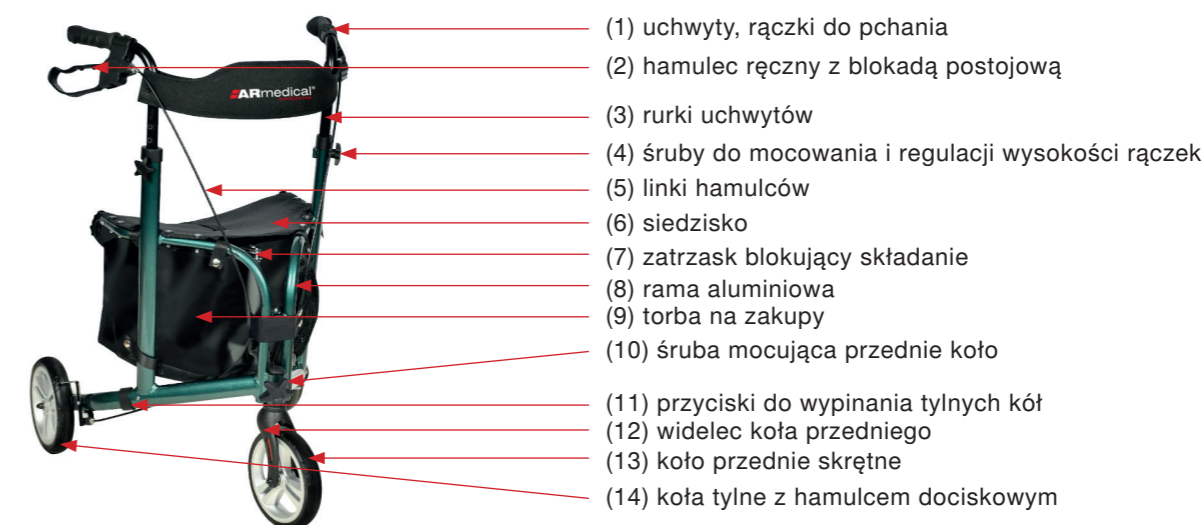

- (1) uchwyty, rączki do pchania
- (2) hamulec ręczny z blokadą postojową
- (3) rurki uchwytów
- (4) śruby do mocowania i regulacji wysokości rączek
- (5) linki hamulców
- (6) siedzisko
- (7) zatrzask blokujący składanie
- (8) rama aluminiowa
- (9) torba na zakupy
- (10) śruba mocująca przednie koło
- (11) przyciski do wypinania tylnych kół
- (12) widelec koła przedniego
- (13) koło przednie skrętne
- (14) koła tylne z hamulcem dociskowym

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie balkonika jest ZABRONIONE!!! GROZI WYPADKIEM!!!

I. Balkonik jest nie stabilny.

a. Czy obydwie rączki balkonika (1) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.

b. Czy śruby do regulacji rączek (4) są solidnie przykręcone? Jeśli nie, należy je dokręcić.

c. Czy rama jest całkowicie rozłożona wraz z zablokowanym zatrzaskiem (7) blokującym składanie? Jeśli nie, należy rozłożyć do słyszalnego zablokowania zatrzasku.

d. Czy wszystkie koła (12,13) są solidnie dokręcone/zamocowane? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić/zamocować.

e. Czy wszystkie elementy ramy balkonika (8) są solidnie ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ BALKONIKA!!!

Każdy **poważny incydent** związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Zakończenie użytkowania:

1. Złóż balkonik zsuwając tylne koła ku sobie po wcześniejszym pociągnięciu uchwyty w siedzisku i zwolnieniu blokady składania, a następnie przesuń do środka uchwyty (1), nastąpi złożenie balkonika.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw balkonik w miejscu gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne.

2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.