

Dane Techniczne:

PARAMETR:	AR-005	AR-006	AR-007	AR-020	AR-021	AR-022	AR-032
Rama:	stalowa	alumiuniowa	alumiuniowa	stalowa	alumiuniowo-stalowa	alumiuniowa	alumiuniowa
Kolor ramy:	niebieski	bordowy, srebrny, niebieski	srebrny nikiel	niebieski	grafitowy	bordowy	czarny
Typ/model:	składany	składany	składany	składany	składany	składany	składany
Max. szerokość całkowita:	61 cm	59 cm	62 cm	49 cm	59 cm	60 cm	64 cm (z uchwytem na kule 67 cm)
Wysokość siedziska:	61 cm	52-60 cm	56 cm	52 cm	49 cm	54 cm	46-53 cm
Regulacja wysokości rączek:	75-98 cm	94-101 cm	81-94 cm	75,5-92 cm	79-88 cm	79-91 cm	67-90 cm
Waga produktu:	9,5 kg	6 kg	6,1 kg	4,5 kg	4,8 kg	8,2 kg	6,8 kg
Maksymalne obciążenie:	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	110 kg
Wyposażenie:	koszyk, tacka	pojemnik siatkowy	torba	-	-	koszyk	torba

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

**KARTA GWARANCYJNA**  
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu		
Nr LOT	Okres gwarancji	.....
Nazwa i nr katalogowy produktu	Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	*niewłaściwe skreślić TAK / NIE*
	Numer ewidencyjny zlecenia .....	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa/pianki)
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podwórki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji podwórki, tac oraz toreb na zakupy)
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. **Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**KARTA GWARANCYJNA**

**PODPÓRKI REHABILITACYJNE**

AR-005  
Podwórka rehabilitacyjna  
4-kołowa, stalowa,  
CLASSIC



AR-006  
Podwórka rehabilitacyjna  
4-kołowa, alumiuniowa,  
PRESTIGE



AR-007  
Podwórka rehabilitacyjna  
4-kołowa, alumiuniowa,  
DYNAMIC



AR-022  
Podwórka rehabilitacyjna  
4-kołowa, alumiuniowa,  
COMFORT



AR-021  
Podwórka rehabilitacyjna  
dwukołowa,  
DELUXE



AR-020  
Podwórka rehabilitacyjna  
dwukołowa,  
STANDARD



AR-032  
Podwórka rehabilitacyjna  
4-kołowa, alumiuniowa  
PRACTICAL

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**  
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111  
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





## INSTRUKCJA OBSŁUGI - PODPÓRKI REHABILITACYJNE

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

### Przeznaczenie wyrobu:

Podpórka rehabilitacyjna jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie..

### Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórce, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

### Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z podpórki – 136 kg (model: AR-032 – 110 kg)  
Maksymalne dopuszczalne obciążenie pojemników na zakupy (koszyk, torba) – 5 kg

### Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (7) są proste, nie nadłamane, uszkodzone (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwie rączki/uchwyty do pchania podpórki (1) ustawione są na tej samej wysokości
3. Sprawdzenie czy rączki/uchwyty (1) podpórki są mocno „zaciśnięte”, przykręcone, uniemożliwiając ich wyjęcie
4. Sprawdzenie czy podpórka posiada wszystkie cztery koła (5) i (8) – AR-020 – 2 koła.
5. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone (5) i (8)
6. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy podpórki są stabilnie ze sobą połączone (7)
7. Sprawdzenie czy podpórka jest całkowicie rozłożona
8. Nie rozkładanie podpórki w miejscach, gdzie może być ślisko np. rozlana ciecz, lód
9. **Nie należy traktować podpórki jako wózek inwalidzki – dotyczy modelu AR-022**

### W celu uniknięcia urazów:

1. Podpórka musi być całkowicie rozłożona (po prawidłowym rozłożeniu musi wyglądać dokładnie jak na zdjęciu)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności podpórki przed użyciem
3. Uchwyty (rączki do pchania) (1) muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać podpórki tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
7. Każdorazowo podpórka musi być trzymana oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące uchwyty (1), możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyty hamulca (2). (nie dotyczy AR-020, AR-021)
8. Podpórka nie może być narażona na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych)
9. Nie wolno przeciążać podpórki, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia koszyka/torby (3)
11. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

**12. Model AR-022 – NIGDY NIE NALEŻY STAWAĆ NA PODNÓŻKU. NIE WOZIĆ PACJENTA JAK NA WÓZKU INWALIDZKIM. GROZI WYPADKIEM!**

### Sposób konserwacji:

Podpórki należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Podpórki należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe, elementy (koła, rączki) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

### Harmonogram konserwacji:

**Co tydzień** Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi

**Cyklicznie** Sprawdź uchwyty pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruba przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć.

### Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie podpórki jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

### I. Podpórka nie jest stabilna.

- a. Czy obydwie rączki podpórki (1) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy zaciski/śruby (6) są solidnie zaciśnięte/dokręcone? Jeśli nie, należy je zaciśnąć/dokręcić.
- c. Czy podpórka jest całkowicie rozłożona? Jeśli nie, należy ją rozłożyć i sprawdzić jej stabilność.
- d. Czy wszystkie koła (5) i (8) są solidnie dokręcone? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić.
- e. Czy wszystkie elementy ramy podpórki (7) są solidnie ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. **NIE WOLNO UŻYWAĆ PODPÓRKI!!!**

### Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

### Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

### Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać używać wyrób.

## ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

**UWAGA!  
NIGDY NIE STAWAĆ NA PODNÓŻKU (9)  
GROZI WYPADKIEM!**



1. Rączki / Uchwyty do pchania
2. Uchwyty hamulca z funkcją postojową
3. Koszyk / torba na zakupy
4. Siedzisko
5. Koła z hamulcem
6. Zaciski / Śruby / Zatraski rączek
7. Rama
8. Koła skrętne (stałe AR-020, AR-021)
9. Podnóżek
10. Oparcie
11. Stopki gumowe

### Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć podpórki z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny podpórki zgodnie z pkt. Uwagi i ostrzeżenia.
3. Uchwyty, rączki do pchania (1) włożyć w otwory znajdujące się w ramie (7). Patrzeć na rys. wyżej.
4. Uchwyty, rączki do pchania (1) zaciśnąć/przykręcić do ramy (7) w sposób uniemożliwiający ich wyjęcie
5. Należy dopasować wysokość podpórki, rączek do pchania (1) do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wykręcić/wyjąć zacisk (AR-005) śrubę (AR-006, AR-020, AR-021, AR-022), zatrask (AR-007, AR-032) (6) znajdujący się w ramie (7). Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie wymaganą wysokość. Ponownie włożyć śrubę/zatrask w istniejący otwór w ramie, dokręcić / zaciśnąć. Czynność powtórzyć dla obydwu rączek podpórki. Rączki do pchania (1) muszą znajdować się na tej samej wysokości.
6. Po rozłożeniu należy bezwzględnie sprawdzić poprawność działania hamulców (nie dotyczy AR-020, AR-021). Należy położyć dłonie na uchwytach (1), palcami podciągnąć rączki hamulców ku górze (2) a następnie sprawdzić dociski blokujące koła z hamulcami (5). Dodatkowo po przeprowadzonym teście uchwyty hamulców (2) należy pchnąć palcami maksymalnie ku dołowi do momentu „kliknięcia” zatrasku. Hamulec powinien znajdować się w pozycji postojowej a następnie sprawdzić popychając lekko balkonik do przodu czy koła są zablokowane.
7. Założyć koszyk, tacę (AR-005, AR-022), torbę (AR-007, AR-032) (3). Patrzeć na rys. wyżej.

**Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.**

### Zakończenie użytkowania:

1. Złóż podpórki zsuwając koła przednie i koła tylne/ nogi ku sobie (AR-005, AR-006, AR-020, AR-021, AR-022).
2. W modelu AR-006, AR-020, AR-021, AR-022, AR-032 uchwyt do składania znajduje się pod siedziskiem. Złóż podpórki (AR-007) zsuwając koła prawe i lewe ku sobie ciągnąc za uchwyt w siedzisku.

### Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw podpórki w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

**DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU**