

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### AR-222 Kołnierz ortopedyczny typu Schantza

#### Opis i zastosowanie:

**Kołnierz Schantza** przeznaczony jest do leczenia dysfunkcji obszaru kręgosłupa szyjnego nie wymagających całkowitego unieruchomienia. Jego działanie polega na częściowym unieruchomieniu i ustabilizowaniu kręgów szyjnych, dzięki czemu zostają one odciążone. Idealny przy wspomaganiu procesu rehabilitacji oraz leczenia. Stosowany w procesie doleczenia przeciążeń odcinka kręgosłupa szyjnego, stanach pourazowych, stłuczeń, lekkich skręceń, zmian zwyrodnieniowych, chorób reumatoidalnych oraz stanów zapalnych. Stosowany korekcyjnie w celu zwiększenia zwężonych przestrzeni międzykręgowych oraz w przypadku wystąpienia artrozy, dyskopatii, kręczu szyi oraz innych zespołów bólowych. Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgów szyjnych mogą powodować sztywność kręgosłupa, a także bóle i zawroty głowy oraz dyskomfort z utrzymywaniem głowy „na wprost” .

Specjalna pianka, z której jest wykonany charakteryzuje się dużą gęstością, pokryta jest przyjemnym w dotyku materiałem. Odpowiednie anatomiczne wyprofilowanie zmniejsza nacisk na żuchwę, jednocześnie dobrze ją podtrzymując. Miękkie zaokrąglone krawędzie gwarantują komfort użytkowania. Zapinanie kołnierza jest niezwykle łatwe gdyż za pomocą jednego rzepa można go idealnie dopasować do szyi. Szeroki wybór 12 rozmiarów gwarantuje idealne dopasowanie do anatomicznych kształtów użytkownika.

**Uwagi i ostrzeżenia:** NIE WOLNO podejmować samodzielnie decyzji o stosowaniu wyrobu, bezwzględnie należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą. Stosowanie długotrwałe kołnierza może doprowadzić do lekkiego zwiotczenia mięśni a tym samym problemów z utrzymaniem głowy „na wprost” po zdjęciu kołnierza. Nie należy zapinać kołnierza zbyt mocno aby nie doprowadzić do zaburzeń w oddychaniu. Nie należy stosować kołnierza w rozmiarze niedopasowanym do budowy anatomicznej użytkownika.

**Przeciwwskazania:** Nie używać w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych. Nie stosować w stanach pooperacyjnych, złamaniach i zwichnięciach kręgów szyjnych wymagających całkowitego unieruchomienia. Nie używać w przypadku zastosowania maści, żeli, olejków lub kremów przeciwbólowych, rozgrzewających, przeciwzapalnych itp.

#### Sposób użycia:

Odpiąć rzep. Założyć wyrób częścią wklęsłą pod brodę i zapiąć rzep z tyłu szyi. Obwód kołnierza należy dopasować w taki sposób aby idealnie przylegał do szyi, podpierał brodę ale jednocześnie nie utrudniał oddychania.

#### Sposób konserwacji - przechowanie:

Prać ręcznie w wodzie o temperaturze nie przekraczającej 40°C z użyciem łagodnych detergentów. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie. Nie należy go wyżymać ani suszyć w suszarce. Po delikatnym odcisnięciu pozostawić w stanie rozłożonym do swobodnego wyschnięcia. Suszyć z daleka od sztucznych źródeł ciepła. Produkt musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem. Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Przechowywać w suchym miejscu. Nie przechowywać w ekstremalnych warunkach atmosferycznych tj. silny mróz, duże nasłonecznienie, wysoka temperatura. Przechowywanie lub użytkowanie zawilgoconego kołnierza może prowadzić do zapleśnienia, nieprzyjemnego

zapachu oraz utraty właściwości umożliwiających dalsze użytkowanie jak również alergii skórnych.

**Incydenty:** Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

**Utylizacja:** Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:** W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, rozdarcia, pęknięcia pianki, oderwania rzepu należy przestać użytkować wyrób.

Kołnierze dostępne w 12 rozmiarach:

<b>Wysokość: 8cm</b>		<b>Wysokość: 10cm</b>		<b>Wysokość: 12cm</b>	
Rozmiar S:	obwód do 38cm	Rozmiar S:	obwód do 38cm	Rozmiar S:	obwód do 38cm
Rozmiar M:	obwód 38-43cm	Rozmiar M:	obwód 38-43cm	Rozmiar M:	obwód 38-43cm
Rozmiar L:	obwód 44-48cm	Rozmiar L:	obwód 44-48cm	Rozmiar L:	obwód 44-48cm
Rozmiar XL:	obwód 49-53cm	Rozmiar XL:	obwód 49-53cm	Rozmiar XL:	obwód 49-53cm

**Skład:** 75% Pianka PU, 20% Nylon, 5% Spandex

**BASIC UDI-DI:** 590771338EB01CJ

Wydanie: 18.01.2023

SYMBOLE:									
									
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Chronić przed wilgocią	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów



**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111  
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

**BASIC UDI-DI:** 590771338KOS1K3



LOT

05.2023

