



INSTRUKCJA OBSŁUGI – KARTA GWARANCYJNA

AR-607 Orteza stopowo-goleniowa, dwukomorowa - niska. Walker Dual Comfort AR-608 Orteza stopowo-goleniowa, dwukomorowa - wysoka. Walker Dual Comfort

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że znacznie przyczyni się do poprawy komfortu oraz prawidłowego procesu leczenia pooperacyjnego i zachowawczego urazów stopy i stawu skokowego. Będzie produktem znacznie ułatwiającym życie codzienne pomimo procesu leczenia kontuzji/urazu. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Możliwość zastosowanie wyrobu bezwzględnie należy skonsultować z lekarzem specjalistą. Poprawna aplikacja jest niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności produktu.

Zastosowanie wyrobu: Orteza stopowo-goleniowa, dwukomorowa **Walker Dual Comfort** przeznaczona jest dla osób z urazami stopy oraz stawu skokowego. Zapewnia ochronę i stabilizację w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, skręceń 2 i 3 stopnia, pęknięć kości, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia. Znajduje również zastosowanie w przypadku naciągnięcia lub naderwania ścięgna Achillesa oraz w celu zapewnienia stabilizacji pooperacyjnej. Stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych komór powietrznych, indywidualnie pompowanych dwiema niezależnymi pompkami, gwarantuje idealne dostosowanie kompresji do stanu chorobowego pacjenta redukując możliwość wystąpienia krwiaków oraz obrzęków. Gwarantuje możliwość regularnej oceny wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należytym stanie higienicznym. Dzięki ultra lekkiej konstrukcji **Walker Dual Comfort** nie obciąża kończyny, a zastosowana miękka wyściółka pneumatyczna gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Sposób zakładania na odwrocie niniejszej instrukcji.

Właściwości wyrobu: Konstrukcja panelowa wykonana z ultra-lekkiego tworzywa, dopinany panel przedni zwiększa komfort zakładania oraz użytkowania. Panele z wyciętymi otworami gwarantującymi prawidłową cyrkulację powietrza. Profilowane, komfortowe krawędzie boczne w celu redukcji ucisku na łydkę. Wyposażona w system pasów obwodowych do występowania krwiaków, obrzęków, bólu zbyt mocno uciśniętej kończyny. Należy kontrolować zmiany skórne, w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie. Wyściółka pneumatyczna wykonana z delikatnego materiału, zapobiegającego otarciom, wyposażona w dwie niezależne pompki. Podeszwa antypoślizgowa o specjalnie zaprojektowanym kształcie wspomagającym w naturalnym i stabilnym chodzie. Podeszwa wyposażona w poduszkę powietrzną „na pięcie” pochłaniającą energię, w celu zmniejszenia wstrząsów i większego komfortu użytkowania. W zestawie indywidualnie regulowana osłona palców.

Parametry techniczne: Waga: od 700g w zależności od rozmiaru **Kolor:** szary **Uniwersalna na prawą i lewą nogę.**

⚠ Przeciwwskazania i zalecenia: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odgniecenia, odparzenia, zmiany troficzne, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych lub niestabilnych złamań. Nie stosować ortozy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Osoby z zaburzeniami czucia oraz diabetycy muszą być regularnie monitorowane przez lekarza specjalistę w trakcie użytkowania ortozy. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Uwagi i ostrzeżenia: W celu uniknięcia wypadku należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się po mokrych lub śliskich powierzchniach. Wyrób musi być prawidłowo założony tzn. wszystkie pasy obwodowe solidnie dopięte, komory powietrzne prawidłowo napompowane aby gwarantować prawidłową stabilizację kończyny – użytkowanie rozpiętej ortozy grozi wypadkiem! W przypadku wystąpienia odrętwienia lub objawów bólowych w obrębie działania ortozy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą. Nie wolno nadmiernie pompować komór powietrznych, może to doprowadzić do występowania krwiaków, obrzęków, bólu zbyt mocno uciśniętej kończyny. Należy kontrolować zmiany skórne, w przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć poziom powietrza w komorach. Aby wyrób spełniał prawidłowo swoją funkcję musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru. Czas stosowania produktu jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza specjalistę, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

Przygotowanie do użycia: Wyjąć ortezę z opakowania. Postępować zgodnie z instrukcją użycia rysunkowo-opisową (na odwrocie) niniejszej instrukcji.

Zakończenie użytkowania: Po zakończeniu użytkowania należy wypuścić powietrze z wyściółki pneumatycznej, zapisać w prawidłowych pozycjach pasy obwodowe. Ortezę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotów. Nie należy pozostawiać ortozy w dużym nasłonecznieniu (szczególnie napompowanej), wzrost temperatury powietrza w środku (a tym samym ciśnienia) może doprowadzić do zerwania wyściółki pneumatycznej.

Sposób konserwacji: Wyściółkę należy czyścić gąbką delikatnie zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu np. mydła, unikając nadmiernego przemoczenia. Pamiętaj aby dobrze spłukać, ponieważ pozostałości mydła mogą powodować podrażnienia skóry. Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać, nie szorować. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła, nie suszyć suszarką. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować. Korpus czyścić wilgotną ściereczką.

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Każdy poważny **incydent** związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

KARTA GWARANCYJNA:

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr zlecenia NFZ	
Nr partii (LOT)	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75, udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 18 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezwzględnie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych, tj. np. siłowe urwanie zaworu, przecięcie materiału wyściółki oraz taśm obwodowych lub uszkodzenie ortozy na skutek jej upadku z wysokości, kopnięcia w twardą przeszkodę. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań, wycierania się podeszwy.
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania ortozy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także nie stosowanie się do punktu „sposób konserwacji”. Zbytne zawilgocenie i pozostawienie w wilgotnym pomieszczeniu może doprowadzić to zapleśnienia materiału.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłączając odpowiedzialność gwaranta.

SYMBOLY:



Wyrób medyczny Zapoznaj się z instrukcją Producent Wyrób spełnia wymagania UE Ostrzeżenie Nr dato / serii Data produkcji się do m-c/rok Nadaje się do zbiórki odpadów Selektywna zbiórka odpadów



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



AR-607 Orteza stopowo-goleniowa, dwukomorowa - niska.

Walker Dual Comfort


AR-608 Orteza stopowo-goleniowa, dwukomorowa - wysoka.

Walker Dual Comfort




Instrukcja zakładania

1.

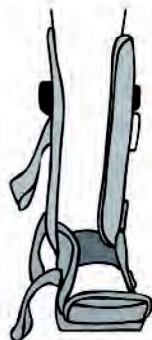


Rozepnij rzepy, wyjmij plastikowy przedni panel a następnie otwórz wyściółkę piankową poprzez rozpięcie rzepów. Umieść stopę i nogę w ortezie.

2.

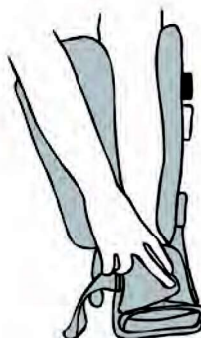

Zacznij od zapinania części stopowej wyściółki.

3.

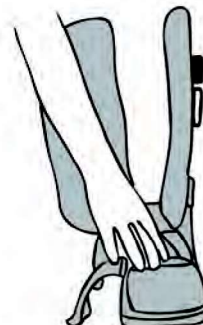

Dopasuj "but", nakładając osłonę palców. Należy pamiętać, że osłona palców jest zdejmowana, dopinana na rzepy.

4.



Zapnij część łydkową wyściółki piankowej.

5.




Założ ponownie plastikowy panel przedni.

6.



Najpierw zapnij pasek z rzepem na górze stopy. Przełóż koniec paska przez plastikowy pierścień D i naciągnij do pożądanego napięcia paska.


7.

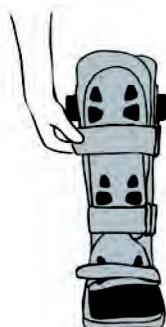

Powtórz tę samą czynność dla środkowego i górnego* paska łydki.


** dotyczy ortozy wysokiej*

8.

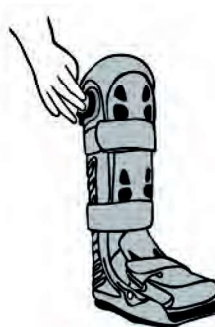

Naciskaj pompkę (z prawej i lewej strony), aby napompować komory powietrzne do pożądanego poziomu stabilizacji i komfortu pacjenta.

9.

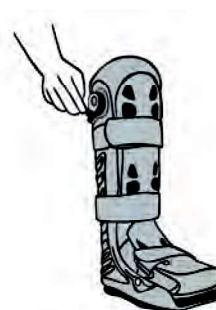

Aby upuścić powietrze lub opróżnić komory powietrzne, naciśnij zawór spustowy, aż powietrze zostanie wypuszczone.

UWAGA PRZECZYTAJ - Ostrzeżenie!!!

Ten wyrób jest przeznaczony do użytku wyłącznie pod nadzorem lekarza. Jeśli podczas korzystania z ortozy wystąpi jakikolwiek ból, obrzęk, zmiany skórne, zmiany uczucia lub jakiegokolwiek nietypowe objawy, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.