



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-167C Elastyczny stabilizator łydki.
IMMOBILO SOFT-C**

Właściwości wyrobu: Stabilizator wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Zastosowany Spandex gwarantuje niezwykłą wytrzymałość wyrobu oraz doskonałą kompresję, która nie ulega osłabieniu wraz z dłuższym czasem stosowania. Miękkie strefy (cieniowana tkanina) zapewniają wysoki komfort użytkowania. Rozciągliwość tkaniny w 4 kierunkach zapewnia jej wysoką elastyczność, doskonale przyleganie do anatomicznych kształtów ciała oraz solidny efekt kompresji.

Zastosowanie: Stabilizator stosowany jest w celu zapewnienia ochrony przeciążonych mięśni i ścięgien łydki. Szczególnie polecany w celu zmniejszenia bólu spowodowanego obrzękiem i zdrętwieniem, stanów wywołanych dolegliwościami przeciążeniowym typu naderwanie mięśnia brzuchatego łydki (łydka tenisisty). Stanowi doskonale wzmocnienie nadwyrężonych mięśni łydki bez ograniczania ruchomości kończyny. Szczególnie polecany w procesie doleczenia uszkodzeń mięśni oraz ścięgien. Stosowany również jako środek prewencyjny zapobiegający powstawaniu dalszych urazów oraz kontuzji.

⚠️ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku zmian skórnych tj. otarcia, oparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran, problemów krążeniowych. Nie stosować stabilizatora po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠️ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Stabilizator należy naciągnąć na kończynę w taki sposób aby znalazł się w przeznaczonym dla niego miejscu (zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu). Stosować jedynie wg przeznaczenia. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru, zbyt mały rozmiar może doprowadzić do silnego ucisku ograniczającego krążenie w kończynie. Rozmiar zbyt duży spowoduje brak kompresji (ucisku) tym samym stabilizator nie spełni swoich określonych funkcji.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół łydki)

S: 25,4-30,5cm, M: 30,5-35,6cm, L: 35,6-40,6cm, XL: 40,6-45,7cm, XXL: powyżej 45,7cm

Skład: 40% Poliester, 35% Nylon, 20% Guma elastyczna, Spandex 5%

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejnymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny Zapoznaj się z instrukcją Producent Wyrób spełnia wymagania UE Ostrzeżenie Nr dato / serii Data produkcji m-c/rok Nadaje się do recyklingu Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia 01.09.2023r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

