



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-875 Orteza nadgarstka i kciuka, krótka.
IMMOBILO WRIST ADVANCED-S**

Właściwości wyrobu: Wykonana z eleganckiego, estetycznego i innowacyjnego materiału. Materiał oddychający, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci. Zastosowanie trzech elementów stabilizujących oraz wykorzystanie nowoczesnego systemu dociągowego zapewnia ściśle przyleganie ortesy oraz bardzo solidną stabilizację zarówno nadgarstka jak i kciuka. Dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanej „łyżki” podpierającej, kończyna pozostaje unieruchomiona we właściwej pozycji anatomicznej. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Zastosowanie: Orteza nadgarstka i kciuka stosowana jest w celu unieruchomienia stawu nadgarstkowego w pozycji anatomicznej. Zalecana szczególnie przy zwichnięciu stawu nadgarstkowego i kciuka, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgna, zwyrodnieniach stawu nadgarstkowego, zniekształceniach i niestabilności nadgarstka oraz w procesie doleczenia złamań kości przedramienia, nadgarstka oraz kości łódeczkowej.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować ortesy po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: Ortezę należy założyć tak, aby szyna anatomiczna znajdowała się po stronie dłoniowej ręki, kciuk wsunięty w przeznaczoną dla niego kieszeń, a rzepy znajdowały się od strony grzbietowej ręki. Następnie dopiąć rzep opasający kciuk, kolejno rzepy mocujące od strony grzbietowej pamiętając o właściwym ucisku.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14-16.5 cm, M: 16.5-19 cm, L: 19-21.5 cm, XL: 21.4-24.4 cm

Wersja: na prawą lub lewą rękę

Długość: 22cm

Skład: 47% Poliester, 28% Aluminium, 15% Nylon, 10% Pianka

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejowymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny



Zapoznaj
się z
instrukcją



Producent Wyrób spełnia
wymagania
UE



Ostrzeżenie



Nr dato /
serii



Data
produkcji
m-c/rok



Nadaje
się do
recyklingu



Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia 16.01.2025r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

