



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-2270N Pas brzuszny stomijny - zapinany, niski.
IMMOBILO OST-PROTECTC**

Właściwości wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnego, miękkiego, elastycznego, kompresyjnego i przyjemnego w dotyku materiału. Materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Wyposażony dodatkowo w oddychający, siatkowy, niezależnie zapinany materiał utrzymujący worek stomijny na właściwej pozycji, jednocześnie go maskując. Dzięki zapinaniu pasa na rzep zakładanie jest niezwykle łatwe. Regulacja rzepem umożliwia dopasowanie odpowiedniej siły kompresji do wymagań i preferencji użytkownika. Zastosowany elastyczny materiał zapewnia idealne dopasowanie się do kształtu ciała oraz umożliwia swobodne poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności w bezpieczny sposób.

Zastosowanie: Pas brzuszny stomijny stosowany jest u osób po operacji stomii. Zapewnia stabilizację brzucha oraz zapobiega przepuklinom okołostomijnym. Stanowi równocześnie ochronę i stabilizację po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, przyspiesza proces rekonwalescencji i zapobiega powstawaniu przepukliny w okolicy przetoki jelita. Stosowanie pasa stomijnego poprawia poczucie pewności i bezpieczeństwa u pacjentów z wylonioną stomią. Otwór ułatwia dostęp do drenów i worków stomijnych a dodatkowy materiał siatkowy zapewnia podtrzymanie i zamaskowanie worka tak aby nie był zbyt widoczny.

⚠ Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści, olejków, kremów lub żeli. Nie stosować w przypadku zaniku mięśnia prostego brzucha wokół stomii oraz w przypadku istniejącej przepukliny okołostomijnej. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą. W przypadku dolegliwości bólowych, szczególnie tych nasilających się, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu bezwzględnie należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem specjalistą. Wyrób należy stosować do „kilku” godzin dziennie, chyba, że lekarz zalecił inaczej.

⚠ Ostrzeżenie: Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiekolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

Instrukcja użytkowania: W pierwszej kolejności należy rozpiąć rzep główny. Leżąc na plecach, pas owinąć wokół brzucha od tyłu do przodu w taki sposób aby otwór na worek stomijny znajdował się w miejscu gdzie znajduje się stomia. Zapiąć rzep główny. Wyjąć worek stomijny przez otwór w pasie a następnie zapiąć rzep osłony siatkowej worka stomijnego. Należy pamiętać o odpowiednim dopasowaniu siły kompresji. Pas nie może powodować dużego bólu spowodowanego nadmiernym uciskiem, ograniczać swobodne oddychanie.

Sposób konserwacji: Przed praniem zapiąć rzepy, prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół brzucha w najszerszym miejscu)

XS: 71-80cm, S: 81-90cm, M: 90-101 cm, L: 102-112 cm, XL: 113-124 cm, XXL: 125-137 cm, XXXL: 138-150 cm

Wysokość: 16cm

Skład: 65% Bawełna 35% Nylon

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **18-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, oleistymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć
punktu sprzedaży
i czytelny podpis.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent
wymagania
UE

Wyrób spełnia
Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

Wydanie 1 z dnia 24.01.2026r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

