

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-151	Model AR-152
Rama:	stalowa - lakierowana proszkowo kolor grafitowy	stalowa - lakierowana proszkowo kolor biały
Blat:	plyta meblowa laminowana, z obrzeżami PCV. Kolor Buk	plyta meblowa laminowana, z obrzeżami PCV oraz ogranicznikami. Kolor Dąb
Wymiary blatu:	60 x 38cm. Grubość 1,85cm	60 x 40cm. Grubość 1,85cm
Zakres regulacji wysokości:	71-115cm	66-97cm
Wymiary podstawy:	61,5cm x 39cm	67cm x 33cm
Kółka materiał:	polipropylen (PP)	polipropylen (PP)
Waga:	7kg	6,5kg
Maksymalne obciążenie blatu:	10kg	10kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr LOT	

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
5. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych, tj. np. nacięcie blatu ostrym narzędziem, lub jego mechaniczne uszkodzenie, oderwanie obrzeża PCV, obicie lub uszkodzenie ramy na skutek jej upadku z wysokości. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów ramy, wycieraniu się blatu meblowego.
6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania stolika przyłóżkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia blatu określonego przez producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyłym stanie higienicznym.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

AR-151 Stolik przyłóżkowy - regulowany. Handy Easy
AR-152 Stolik przyłóżkowy - regulowany. Handy Strong



AR-151



AR-152

ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





AR-151 Stolik przyłóżkowy - regulowany. Handy Easy AR-152 Stolik przyłóżkowy - regulowany. Handy Strong

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego wózka inwalidzkiego, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dodażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennej opieki nad chorym, poprawiającym komfort i proces rehabilitacji osoby leżącej. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Stolik przyłóżkowy - regulowany przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych leżących w łóżku. Znajduje zastosowanie u osób po zabiegach operacyjnych, w trakcie rehabilitacji, osób w podeszłym wieku oraz z ograniczoną zdolnością poruszania się. Wspiera codzienne funkcjonowanie pacjentów o ograniczonej mobilności. Umożliwia pacjentowi wykonywanie podstawowych czynności bez konieczności opuszczania łóżka. Ułatwia spożywanie posiłków, przyjmowanie leków, czytanie, pisanie, korzystanie z urządzeń elektronicznych (np. telefonu, tabletu) oraz prowadzenie drobnych aktywności terapeutycznych. Stolik przyłóżkowy wspiera proces leczenia i rekonwalescencji poprzez zwiększenie samodzielności pacjenta oraz poprawę komfortu psychicznego i fizycznego. Może również odciążać personel medyczny lub opiekunów, ograniczając konieczność częstej pomocy przy prostych czynnościach. Dzięki regulowanej wysokości a także możliwości zmiany nachylenia blatu, może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz pozycji ciała. Jego konstrukcja i funkcjonalność są dostosowane do potrzeb osób przebywających w pozycji leżącej lub półsiedzącej, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowej opieki długoterminowej.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji (pozycji siedzącej), brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny użytkować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar obciążenia blatu stolika – **10 kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy rama stalowa oraz płyta meblowa (1) blatu nie posiadają wyraźnych uszkodzeń mechanicznych (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie śruby mocujące AR-151 (2,3), AR-152 (7) blat z podstawą są solidnie dokręcone
3. Sprawdzenie czy śruba służąca do zmiany kąta blatu jest solidnie dokręcona AR-151(2), AR-152 (7)
4. Sprawdzenie czy śruba służąca do regulacji wysokości jest solidnie dokręcona AR-151(3), AR-152 (7)
5. Sprawdzenie czy stół posiada wszystkie 4 koła oraz czy są solidnie zamocowane? AR-151(6,7), AR-152 (8,9)



W celu uniknięcia urazów:

1. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem m.in. wszystkich elementów przykręconych tj. poszczególnych elementów ramy AR-151(4,5), AR-152 (2,3,4,6) oraz blatu (1)
2. Śruba(y) służąca(e) do zmiany kąta blatu musi być solidnie przykręcona. Postawienie np. gorącego napoju na niestabilnym blacie może spowodować poparzenie.
3. Podstawa stolika AR-151 (5), AR-152 (4) musi spoczywać całą swoją powierzchnią na podłodze (wszystkie 4 koła) - nie może być podparta częściowo.
4. Należy ustawić stół na płaskiej powierzchni, a nie na pochyłości, aby uniknąć przewrócenia się użytkownika.
5. Przed umieszczeniem przedmiotów lub płynów na stole należy upewnić się, że stół jest stabilny.
6. Nie należy wstawiać ani siadać na stole, ponieważ może się przewrócić.
7. Nie należy używać stołu jako kuli do chodzenia, krzesła ani do transportu osób lub przedmiotów.
8. Zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania, szczególnie przy spożywaniu gorących napojów oraz posiłków.
9. Zabrania się gwałtownego opierania o stół.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia blatu określonego przez Producenta. GROZI WYPADKIEM!!!

Sposób konserwacji:

Czyścić wilgotną szmatką (szczególnie blat) z zastosowaniem delikatnych detergentów np. mydła – następnie osuszyć. NIE stosować benzyny, rozpuszczalników lub zawierających chlor. Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Rozlana ciecz na blacie może spowodować jego odkształcenie. NIE używać środków ściernych!

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Stolik przyłóżkowy nie jest stabilny.

- a. Czy śruba do regulacji kąta blatu jest solidnie przykręcona? Jeśli nie, należy ją solidnie dokręcić
 - b. Czy śruba do regulacji wysokości jest solidnie przykręcona? Jeśli nie, należy ją solidnie dokręcić
 - c. Czy wszystkie 4 koła podstawy są solidnie zamocowane i równomiernie stoją na podłodze? Jeśli nie, należy je solidnie zamocować
- Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ STOLIKA PRZYŁÓŻKOWEGO!!!

Incydenty:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.


Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.


ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

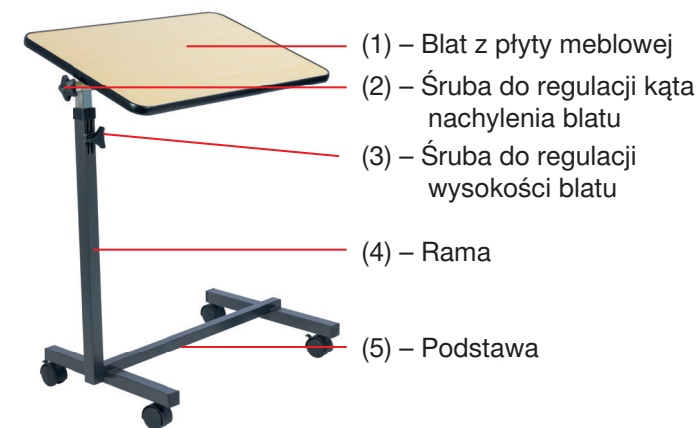

AR-151

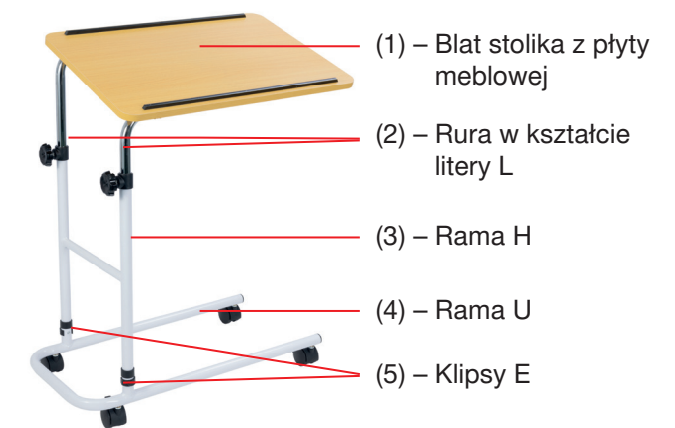

AR-152

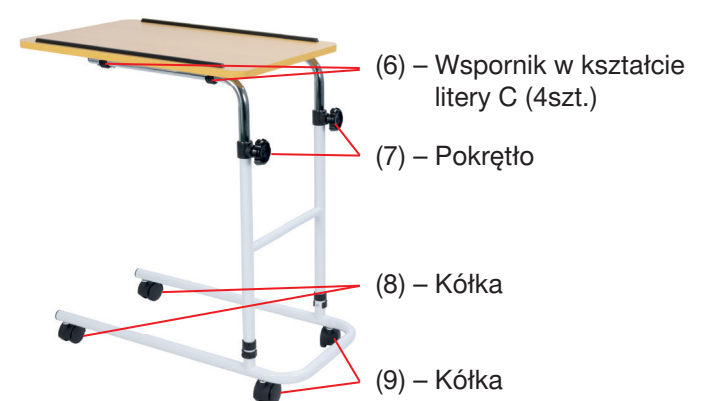

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć stół przyłóżkowy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia.**
3. **Dot. AR-151** W pierwszej kolejności należy przykręcić koła (6)(7) do podstawy (5). Następnie dwie poprzeczki z kółkami (6)(7) należy przykręcić za pomocą śrub znajdujących się w zestawie do dolnej części kształtownika szarego w kształcie litery „L” w miejscach wytłoczonych tak, by zapewniły stabilne połączenie. Czarne pokrętło, śrubę do regulacji wysokości (3) lekko wkręcić w otwór znajdujący się w górnej części grafitowego kształtownika, ramy (4). Następnie do tego kształtownika włożyć chromowany kształtownik od kwadratowej strony po czym dokręcić pokrętło, śrubę regulacji wysokości (3). Na okrągłą część chromowanego kształtownika ze skośnie ściętymi kształtkami nałożyć do końca blat tak by skośne części były równo ułożone i lekko weszły w rurkę pod blatem. Dokręcić pokrętło, śrubę do oporu (regulacja kąta pochylenia blatu (2))
4. **Dot. AR-152** W pierwszej kolejności należy przykręcić kółka (8)(9) do podstawy, ramy U (4). Upewnij się, że kółka są całkowicie dokręcone. Obróć ramę U (4) tak, aby króćce były skierowane do góry. Opuść ramę H (3) na króćce ramy U (4). Upewnij się, że czarne plastikowe kołnierze na ramie H (3) znajdują się u góry, a króćce ramy H (3) są skierowane na zewnątrz. Dopasuj wstępnie wycięte otwory w dolnej części ramy H (3) do wstępnie wyciętych otworów w czopach ramy U (4). Włóż klipsy E (5), aby zablokować je w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że zatrzasnęły się na miejscu i są zabezpieczone. Umieść rurę w kształcie litery L (2) na spodniej stronie blatu stołu (1), przestrzegając następujących zasad (**BARDZO WAŻNE**): Zanitowany koniec rury w kształcie litery L (2) MUSI znajdować się na spodniej stronie blatu stolika (1). Zanitowany koniec rury w kształcie litery L (2) MUSI znajdować się pomiędzy wstępnie wywierconymi otworami najbliższymi krawędzi stolika (około 10 cm od krawędzi stołu). Przymocuj rurki w kształcie litery L (2) za pomocą czterech wsporników w kształcie litery C (6) (czarne elementy z tworzywa z otworami na śruby) i ośmiu śrub. Upewnij się, że dwa wsporniki w kształcie litery C (6) bliższe krawędzi stolika znajdują się między dwoma nitami. Nie dokręcaj ich zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie blatu stolika (1). Włóż wolne końce rurek w kształcie litery L (2) do ramy H (3). Powoli opuść (wsuń) blat stołu (1). Upewnij się, że opuszczasz obie strony jednocześnie, aby zapobiec zakleszczeniu. Dokręć lekko dwa pokrętła (7) do małych trzpieni u góry ramy H (3). Podnieś lub opuść blat stołu (1) do żądanej wysokości i dokręć pokrętła (7), obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że wysokość jest taka sama po obu stronach; w przeciwnym razie stół nie będzie wypoziomowany i nie będzie bezpieczny w użyciu. Aby wyregulować wysokość, poluzuj pokrętła (7), obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (i powtórz krok).

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skontaktować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

Złożyć blat stolika i położyć w miejscu, gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne oraz zawiłgocenie.

Czyszczenie i przechowywanie:

W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU